


Aboca Fitonasal Pediatric spray, 125 ml

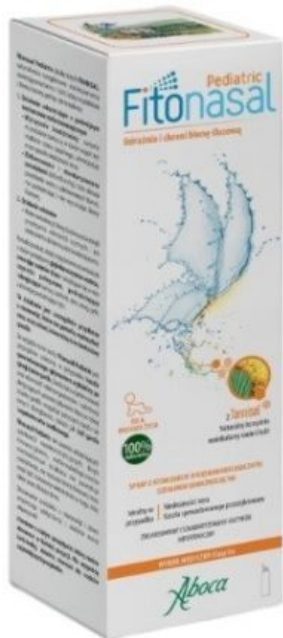

Cena: 49,99 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	125 ml
Opakowanie	125 ml
Postać	spray
Producent	ABOCA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Wiek	od 6 miesięcy

Opis produktu

Opis

Fitonasal Pediatric to wyrób medyczny w formie sprayu, zawierający naturalne składniki wskazany w przypadku niedrożności i podrażnienia błony śluzowej nosa dla dzieci od 6. miesiąca życia.

Fitonasal Pediatric działa dzięki Tannisal, kompleksowi molekularnemu zawierającemu taniny i halit, który współdziała z błoną śluzową. Działa udraźniająco, dzięki zbilansowanemu działaniu osmotycznemu, które ułatwia przenikanie wody z zablokowanych tkanek, nie podrażniając i nie wysuszając błony śluzowej. Ochronia błonę śluzową dzięki tworzeniu warstwy mukoadhezyjnej oraz działaniu antyoksydacyjnemu.

Ponadto produkt, dzięki rozpylanemu strumieniowi o stałym przepływie, dogłębnie oczyszcza jamę nosową, usuwając nadmiar śluzu i znajdujące się w nim czynniki patogenne, podrażniające i alergizujące (wirusy, bakterie, dym, smog, pyłki, substancje podrażniające itp.). Stosowanie produktu u niemowląt i dzieci wspomaga oddychanie i ułatwia nocny odpoczynek.

Fitonasal Pediatric nie wysusza błony śluzowej nosa, nie podrażnia i może być stosowany wielokrotnie w ciągu dnia, także przez dłuższy okres.

Wskazania

Spray do nosa stosowany w przypadku niedrożności i podrażnienia jamy nosowej spowodowanych gripą, przeziębieniem, a także ostrym i przewlekłym alergicznym nieżytem nosa oraz zapaleniem zatok.

Działanie

Dzięki rozpylanemu strumieniowi o stałym przepływie Fitonasal Pediatric jest wskazany u niemowląt, które nie potrafią wydymuchać nosa, oraz u dzieci, które robią to w niewłaściwy sposób. Jest zalecany w przypadku kaszlu spowodowanego spływaniem wydzieliny po tylnej ścianie gardła.

Dawkowanie

Dzieci od 6. miesiąca do 1. roku życia:

- Położyć dziecko na boku, umieścić końcówkę atomizera w górnym nozdrzu i rozpylić produkt.
- Powtórzyć czynność z drugim nozdrzem, kładąc dziecko na drugim boku.

Dzieci powyżej 1. roku życia:

- Umieścić końcówkę atomizera w nozdrzu i delikatnie nacisnąć, przytrzymując przez kilka sekund.
- Oczyszczyć nos lub, jeśli to możliwe, wydmuchać i rozpylić do drugiego nozdrza.

Stosować Fitonasal Pediatric co najmniej 2 razy dziennie, rano i wieczorem, oraz w razie potrzeby.
Po każdym użyciu wyczyścić atomizer za pomocą czystej, wilgotnej szmatki i dokładnie wysuszyć.

Skład

Substancje czynne: Tannisal , standaryzowany kompleks molekularny, zawierający: frakcję taninową z oczaru wirginijskiego i halit (sól wydobywana ze złóż kopalin, nieprzetworzona chemicznie).

Zawiera ponadto: wodę, glicerynę roślinną, sok z cytryny, nahcolite (naturalny wodorowęglan sodu).

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 50°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.