

Apteo Care Test owulacyjny LH paskowy, 5 sztuk



Cena: 17,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	5 sztuk
Postać	test
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Test owulacyjny LH paskowy, to jednorazowy test o wysokiej czułości oraz skuteczności, wykrywający poziom hormonu LH w moczu. Dokładny i szybki w użyciu, wynik otrzymany jest w ciągu 10 minut. 1 linia – brak owulacji w ciągu najbliższych 24-48 godzin, 2 linie – można stwierdzić owulację w ciągu 24-48 godzin.

Zastosowanie

Test owulacyjny.

Sposób użycia

- Test wykonywać w pomieszczeniu, w którym temperatura utrzymuje się w granicach 18-30°C.
- Przed użyciem należy przygotować stoper.
- Zebrać próbkę moczu do pojemnika testowego dołączonego do opakowania. Nie zaleca się pobierać do badania próbki pierwszego, porannego moczu.
- Wyjąć test z saszetki foliowej, rozrywając ją w miejscu nacięcia chwycić za jego górną część. Środek pochłaniający wilgoć znajdujący się w środku saszetki wyrzucić wraz z saszetką.
- Zanurzyć pasek testowy w pobranym moczu do linii paska, tak jak pokazuje strzałka. Nie zanurzać powyżej linii MAX (maksimum).
- Po 15 sekundach wyjąć pasek testowy z badanego moczu i umieścić go na płaskiej, czystej, suchej niechłonnej powierzchni.
- Obserwować przemieszczanie się badanej próbki moczu przez strefę testową i kontrolną paska testowego. Odczekać, aż pojawią się barwne linie.
- Wynik testu należy odczytać po 10 minutach od momentu zanurzenia paska testowego w moczu.
- Nie brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 15 minut, ponieważ może być on błędny.
- Po jednokrotnym użyciu test należy wyrzucić.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Ten produkt posiada oznaczenie CE. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadany przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ten produkt posiada oznaczenie CE o numerze jednostki notyfikowanej (1434).
- Ten produkt posiada deklarację zgodności UE - spełnia wymogi Unii Europejskiej.
- Jest to test do samokontroli.
- Do produktu dołączona jest etykieta i instrukcja obsługi w języku polskim.

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.