

Apteo Komora inhalacyjna KI-200, 1 sztuka



Cena: 60,30 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Komora inhalacyjna jest urządzeniem ułatwiającym stosowanie leków w postaci aerozoli do inhalacji (po konsultacji z lekarzem). Komora inhalacyjna KI-200 dzięki zawartości w opakowaniu dwóch wielkości maseczek może być wykorzystywana w leczeniu dzieci i dorosłych.

Sposób użycia

- Zdejmij osłonkę z dozownika z lekiem i umieść go we wskazanym na rysunku miejscu.
- Potrząśnij dozownikiem zamocowanym do tuby, z nałożoną maseczką.
- Przyłóż maseczkę do twarzy tak, by zakrywała usta i nos.
- Po wykonaniu wydechu uruchom dozownik i wykonując głęboki, powolny wdech, przyjmij dawkę leku.
- Wstrzymaj oddech na 8-10 sekund lub oddychaj powoli przez komorę, biorąc 2-3 wdechy (w zależności od zaleceń lekarza).
- Przed kolejnymi powtórzeniami inhalacji postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w ulotce dołączonej do leku i dozownika.
- Po zakończeniu inhalacji wyjmij z komory inhalacyjnej dozownik z lekiem.

Dodatkowe informacje

Opakowanie zawiera:

- 1 komorę inhalacyjną,
- 2 maseczki na twarz (1 dla dziecka, 1 dla osoby dorosłej)
- zintegrowane z komorą mocowanie dozownika na lek w aerozolu,
- instrukcję używania.

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.