

Apteo Termofor bez pokrowca 2l, 1 sztuka



Cena: 19,79 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Postać	termofor
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Termofor bez pokrowca Apteo, to naturalny sposób łagodzenia bólu. Termofor posiada niską zawartość gumy, bez drażniącego zapachu. Cechuje go wysoka szczelność i dobra jakość. Stosowany jest w celach profilaktyczno-leczniczych do miejscowego wygrzewania ciała.

Zastosowanie

Profilaktyczno-lecznicze, do miejscowego ogrzewania ciała.

Sposób użycia

- Termofor należy napełniać wodą do ok. 3/4 objętości.
- Napełniać termofor powoli w pozycji pionowej trzymając za otwór wlewowy, aby uniknąć rozpryskiwania się wody. Zakręcić termofor za pomocą korka, aby uniemożliwić wyciekanie wody.
- Po ok. 5-10 minutach termofor osiągnie maksymalną temperaturę.
- Po zakończeniu stosowania termoforu odkręcić korek, wylać wodę, a następnie pozostawić otwarty termofor wlewnem w dół, do całkowitego wysuszenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Sprawdzić szczelność przed użyciem.
- Nie należy używać wrzącej wody do napełniania termoforu, gdyż może powodować to uszkodzenie termoforu.
- Termofor napełniony gorącą wodą może powodować oparzenia.
- Nie umieszczać termoforu w kuchenke mikrofalowej.
- Wyrób nie może być stosowany przez osoby z zaburzeniami poznawczymi, a także u niemowląt.
- Stosowanie u dzieci tylko pod kontrolą osoby dorosłej.
- Unikać silnego nacisku (np. siadania na wyrobie), aby nie spowodować pęknięcia.
- Należy kontrolować powierzchnię termoforu podczas okresu użytkowania. W przypadku pojawienia się wad lub uszkodzeń

należy zaprzestać jego stosowania.

- Nie należy stosować maści zawierających oleje lub składniki szkodliwe dla gumy na część ciała, która będzie miała kontakt z termoforem. W przypadku takiego kontaktu należy umyć termofor wodą z mydłem.
- Unikać długotrwałego bezpośredniego kontaktu wyrobu ze skórą. Jeśli uzyskana temperatura jest zbyt wysoka należy owinąć termofor w ręcznik lub ściereczkę.
- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem.