

## Apteo Termofor z pokrowcem 2l, 1 sztuka



Cena: 39,99 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Postać	termofor
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

### Opis produktu

#### Opis

Termofor z pokrowcem Apteo 2l, do stosowania w celach profilaktyczno-leczniczych, do miejscowego ogrzewania ciała. To naturalny sposób łagodzenia bólu. Termofor posiada miły w dotyku pokrowiec.

#### Zastosowanie

Do stosowania w celach profilaktyczno-leczniczych, do miejscowego ogrzewania ciała.

#### Sposób użycia

- Termofor należy napełniać wodą do ok. 3/4 objętości.
- Napełniać termofor powoli w pozycji pionowej trzymając za otwór wlewowy, aby uniknąć rozpryskiwania się wody. Zakręcić termofor za pomocą korka, aby uniemożliwić wyciekanie wody.
- Po ok. 5-10 minutach termofor osiągnie maksymalną temperaturę.
- Po zakończeniu stosowania termoforu odkręcić korek, wylać wodę, a następnie pozostawić otwarty termofor wlewem w dół, do całkowitego wysuszenia.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Należy sprawdzić szczelność przed użyciem.
- Nie należy używać wrzącej wody do napełniania termoforu, gdyż może powodować to uszkodzenie termoforu.
- Termofor napełniony gorącą wodą może powodować oparzenia.
- Nie umieszczać termoforu w kuchence mikrofalowej.
- Wyrób nie może być stosowany przez osoby z zaburzeniami poznawczymi, a także u niemowląt.
- Stosowanie u dzieci tylko pod kontrolą osoby dorosłej.
- Unikać silnego nacisku (np. siadania na wyrobie), aby nie spowodować pęknięcia.
- Należy kontrolować powierzchnię termoforu podczas okresu użytkowania. W przypadku pojawienia się wad lub uszkodzeń należy zaprzestać jego stosowania.

- Nie należy stosować maści zawierających oleje lub składniki szkodliwe dla gumy na część ciała, która będzie miała kontakt z termoforem. W przypadku takiego kontaktu należy umyć termoфор wodą z mydłem.

#### Dodatkowe informacje

- Niska zawartość gumy - niedrażniący zapach.
- Wysoka szczelność i dobra jakość.