

Baby Boom, test ciążowy płytkowy, 1 sztuka



Cena: 9,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Producent	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Baby Boom, Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, przeznaczony do użytku domowego, jednorazowego użycia. To szybki test służący do oznaczania gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w próbkach moczu, w celu wczesnego rozpoznania ciąży u kobiet. Test pozwala wykryć ciążę już 7 dni od zapłodnienia.

Zastosowanie

Wczesna diagnostyka ciąży.

Skład

- Test kasetowy wyjmij z foliowej saszetki.
- Za pomocą pipety pobierz próbkę moczu i umieść kilka kropli w zagłębieniu na kasecie (2-3 krople, ok. 100 µl). Uważaj przy tym, aby nie przepętnić podkładu chłonnego.
- Odczytaj wynik testu po 5 minutach.. W zależności od stężenia hormonu hCG w moczu, pozytywny wynik może pojawić się już po 40 sekundach, należy jednak odczekać pełne 5 minut w celu jego potwierdzenia. Wyniku nie należy odczytywać później, gdyż może być on błędny.

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

- Test przeznaczony jest do jednorazowego użycia. Po odczytaniu wyniku wyrzucić test do pojemnika na śmieci, traktując go jako potencjalne źródło zakażenia.
- Nie używać testu po terminie ważności umieszczonym na foliowej saszetce.
- Wyrób przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in-vitro. Tylko do użytku zewnętrznego.
- Przed wykonaniem testu należy uważnie przeczytać ulotkę informacyjną. Kolejne kroki należy wykonywać zgodnie z instrukcją.
- Nie używać testu, jeśli saszetka foliowa jest uszkodzona.
- Po otwarciu saszetki foliowej należy natychmiast wykonać test.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Ten produkt posiada oznaczenie CE. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadany przez producenta i uznany za

spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ten produkt posiada oznaczenie CE o numerze jednostki notyfikowanej (0123).

- Ten produkt posiada deklarację zgodności UE - spełnia wymogi Unii Europejskiej.
- Jest to test do samokontroli.
- Do produktu dołączona jest etykieta i instrukcja obsługi w języku polskim.

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.