

# Baby Boom, test ciążowy strumieniowy, 1 sztuka



Cena: 9,99 zł

## Opis słownikowy

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Opakowanie  | 1 sztuka                |
| Producent   | PASO-TRADING SP. Z O.O. |
| Rejestracja | wyrób medyczny inny     |

## Opis produktu

### Opis

Test ciążowy strumieniowy, Baby Boom, to test wczesnego zdiagnozowania ciąży w warunkach domowych. Umożliwia potwierdzenie ciąży już po 7 dniach od zapłodnienia. Test charakteryzuje się szybkością oraz łatwością w użyciu.

### Zastosowanie

Wczesna diagnostyka ciąży w warunkach domowych, jednorazowego użytku.

### Sposób użycia

- Test powinien osiągnąć temperaturę pokojową.
- Ostrożnie wyjmij test strumieniowy z saszetki foliowej.
- Przytrzymaj test i zdejmij nasadkę w celu odsłonięcia paska absorpcyjnego.
- Skieruj pasek absorpcyjny w dół; trzymaj pasek absorpcyjny pod strumieniem moczu, przez co najmniej 5 sekund lub umieść go na co najmniej 20 sekund w zebranej próbce moczu, by został dokładnie zmoczony.
- Zakryj z powrotem test nasadką i poczekaj na pojawienie się kolorowych linii.
- Po 5 minutach odczytaj wynik testu. W zależności od stężenia hCG w moczu, pozytywny wynik może pojawić się już po 40 sekundach, mimo to odczekaj 5 minut w celu potwierdzenia wyniku. Wyniku nie należy odczytywać później, gdyż może być on błędny.

### Przechowywanie

W miejscu niedostępnym dla dzieci.

### Dodatkowe informacje

- Wyrób przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in-vitro. Tylko do użytku zewnętrznego,
- Przed wykonaniem testu należy uważnie przeczytać ulotkę informacyjną. Kolejne kroki należy wykonywać zgodnie z instrukcją,
- Nie używać testu po terminie ważności umieszczonym na foliowej saszetce,
- Po otwarciu saszetki foliowej należy natychmiast wykonać test,
- Przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użycia,
- Po odczytaniu wyniku test należy wyrzucić. Próbkę moczu i test należy traktować jako potencjalne źródło zakażenia. Unikać kontaktu ze skórą,

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Ten produkt posiada oznaczenie CE. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadany przez producenta i uznany za

spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ten produkt posiada oznaczenie CE o numerze jednostki notyfikowanej (0123).

- Ten produkt posiada deklarację zgodności UE - spełnia wymogi Unii Europejskiej.
- Jest to test do samokontroli.
- Do produktu dołączona jest etykieta i instrukcja obsługi w języku polskim.

#### **Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego**

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.