

Biotrue, płyn do pielęgnacji soczewek miękkich, 300 ml



Cena: 31,49 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	300 ml
Opakowanie	300 ml
Postać	płyn
Producent	BAUSCH & LOMB POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Bausch&Lomb Biotrue to wielofunkcyjny płyn do pielęgnacji soczewek. Zawiera hialuronian sodu który łagodzi podrażnienia na powierzchni oczu spowodowane użytkowaniem szkieł kontaktowych. Poprzez zastosowaniu odpowiedniego pH i substancji nawilżających płyn Biotrue zapewnia naturalne nawilżenie gałki ocznej. Płyn zapewnia podwójny system denzyfikacji, działa bakteriobójczo i grzybobójczo. Płyn Biotrue zapobiega pojawianiu się charakterystycznych osadów białkowych na powierzchni soczewki. Preparat skutecznie usuwa zanieczyszczenia i zwalcza niebezpieczne bakterie. Do płynu Biotrue dołączony jest pojemniczek na soczewki.

Sposób użycia

- Po zdjęciu soczewki z oka należy położyć ją na dłoni i polać kilkoma kroplami płynu, a następnie pocierać przez kilka sekund po obu stronach.
- Wyczyszczone w ten sposób soczewki dodatkowo należy przepłukać świeżym płynem pielęgnacyjnym.
- Na koniec umieścić w pojemniku na soczewki i zalać nową porcją płynu tak, aby były przykryte i pozostawić.

Skład

Hialuronian sodu, Sulfobetaina, Poloksamina, Kwas borowy, Boran sodu (boraks), Sól dwusodowa kwasu etylenodwuaminoczworoctowego, Chlorek sodu, Biguanid poliaminopropylu 0,00013%, Polyquaternium 0,0001%.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Ważna jest regularna wymiana pojemniczka na soczewki raz na 3 miesiące.
- Ważność płynu po otwarciu do 3 miesięcy.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu.
- Płyn posiada znak CE 0050, który informuje o spełnieniu wymogów Unii Europejskiej.
- Produkt posiada etykietę w języku polskim. Do produktu dodana jest również instrukcja obsługi w języku polskim.

