

Blephademodex, chusteczki do higieny powiek, jałowe, 30 sztuk



Cena: 69,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 sztuk
Postać	chusteczki jałowe
Producent	LABORATOIRES THEA
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Wyrób medyczny Blephademodex to jednorazowe, sterylne chusteczki do higieny rzęs i powiek, podczas infekcji nużeńcami. Chusteczki jałowe nasączone są płynem oczyszczającym bez konserwantów, zawierającym terpinen-4-ol (oczyszczony wyciąg z olejku z drzewa herbacianego) oraz nawilżający i kojący hialuronian sodu. Produkt odpowiedni dla osób dorosłych.

Zastosowanie

Codzienna higiena powiek podczas infekcji nużeńcami.

Sposób użycia

- Umytymi rękami otworzyć saszetkę i rozłożoną chusteczkę umieścić ściereczkę na palcu wskazującym i zawiązać ją.
- Trzymając oko zamknięte, delikatnie przyłożyć chusteczkę do powiek i nasady rzęs.
- Ostrożnie masować powieki małymi, okrężnymi ruchami, usuwając wszelkie strupki (zanieczyszczenia), łupież czy wydzieliny.
- Po aplikacji należy przez 15 sekund trzymać oko zamknięte.
- Do drugiego oka użyć nowej chusteczki.

Skład

Sterylnie chusteczki nasączone płynem.

Płyn zawiera: PEG-8, Polisorbat 80, Poloxamer 184, Terpinen-4-ol, PEG-6 caprylic/capric glycerides (tj. kaprylano-kaprynian makrogolo-6-glicerolu), kwas hialuronowy (*w postaci soli-hialuronian sodu), fosforan dipotasowy, diwodorofosforan potasu, woda oczyszczona.

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik.
- Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią - chyba, że lekarz zaleci inaczej.