

CICHO wSZA WYCZESKA, grzebień do włosów na wszy, 1 sztuka



Cena: 54,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	grzebień do włosów
Producent	ALBERT POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny
Wiek	bez ograniczeń wiekowych

Opis produktu

Opis produktu

Grzebień CICHO wSza jest ze stali nierdzewnej oraz posiada system delikatnych podwójnych kanałków, przez co skuteczniej zbiera gnidy i wszy oraz jest delikatny dla włosów. Zaokrąglone spawane końcówki grzebienia zapobiegają naruszeniu struktury włosów oraz podrażnieniom skóry głowy. Dodatkowym atutem jest możliwość dezynfekcji grzebienia bez utraty właściwości produktu.

Zastosowanie

Grzebień do włosów, który idealnie sprawdzi się u pacjentów borykających się z problemem wszawicy. Grzebień jest przeznaczony dla dzieci jak i dorosłych. Wyczeska jest uzupełnieniem pozostałych produktów z serii CICHO wSza.

Sposób użycia

Należy dokładnie umyć włosy np. szamponem do włosów na wszawicę CICHO wSZA, osuszyć je ręcznikiem i podzielić na mniejsze pasma. Delikatnie i ostrożnie poprowadzić grzebień na włosach, od cebulek włosów aż po same końce. Po każdym przeczesaniu pasma włosów należy go przepłukać. Najlepiej zrobić to w misce wypełnionej wodą i mydłem. Po wypłukaniu grzebienia należy osuszyć go ręcznikiem papierowym oraz sprawdzić czy na grzebieniu nie pozostały wszy i gnidy. Po dokładnym i starannym wyczesaniu włosów grzebieniem zaleca się ponowne umycie włosów. Po wysuszeniu włosów należy zweryfikować czy wszystkie pasożyty zostały usunięte. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek wszy lub gnidy zaleca się powtórzenie czynności.

Składniki

Stal nierdzewna.

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

- Zaleca się po każdym użyciu wygotować grzebień. W tym celu zanurz grzebień w pojemniku z wrzącą wodą przez co najmniej 5 do 10 minut, aby zabić wszy i ich gnidy. Zalecamy, aby każdy człowiek rodziny miał własny grzebień.
- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

