

ClinSin Med, irygator + 16 saszetek do płukania zatok, zestaw



Cena: 26,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	irygator + 16 saszetek do płukania zatok
Postać	zestaw
Producent	N.P.ZDROVIT SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Opis

Wyrób medyczny ClinSin med przeznaczony jest do stosowania u dzieci powyżej 12. roku życia i u osób dorosłych. Z ClinSin med można przygotować roztwór izotoniczny i hipertoniczny.

- Roztwór izotoniczny w naturalny sposób oczyszcza nos z zalegających alergenów, bakterii i wirusów.
- Roztwór hipertoniczny, dzięki działaniu osmotycznemu, poza działaniem oczyszczającym, wykazuje również działanie obkurczające śluzówkę w przypadku infekcji, alergii (katar sienny) oraz stanów zapalnych zatok i zalegania wydzieliny w zatokach.

Zastosowanie

- Do stosowania w przypadku: zapalenia zatok przynosowych; nieżytów nosa różnego pochodzenia (alergie i infekcje); zabiegów chirurgicznych nosa i zatok (przed i po); wysokiego zapylenia lub nadmiernie przesuszonego powietrza, którym oddychamy; wysuszenia śluzówki nosa po stosowaniu leków donosowych; utrzymania właściwej higieny nosa i zatok.
- Przeznaczony jest do stosowania u dzieci powyżej 12. roku życia i u osób dorosłych.

Sposób użycia

- Płukanie należy wykonywać 1-2 razy dziennie z zachowaniem co najmniej 1 godziny przerwy między płukaniem nosa i zatok a wyjściem na dwór (przy temperaturze poniżej 19°C) lub pójściem spać.
- Przed zastosowaniem należy uważnie przeczytać instrukcję użycia dołączoną do opakowania.
- Zawartość jednej saszetki (lub 2 dla roztworu hipertonicznego) wsyp do irygatora i uzupełnij ciepłą wodą do odpowiedniego poziomu oznaczonego napisem 240 ml.
- Zakręć dokładnie butelkę, zatkać otwór w nakrętce palcem i wstrząśnij irygatorem do uzyskania klarownego roztworu.
- Stań w pozycji nachylonej nad umywalką. Oddychając swobodnie przez usta przyłóż końcówkę nakrętki irygatora do jednego otworu nosa. Płynnie ściśnij butelkę tak, aby połowa roztworu dostała się do otworu nosowego. Nie uciskaj drugiego otworu, musi on pozostać otwarty, aby wypływająca woda wraz z wydzielinami miała ujście na zewnątrz jamy nosowej. To samo

powtórz dla drugiego otworu nosa.

- Nie połykaj roztworu.
- Po płukaniu oczyść nos chusteczką jednorazową poprzez wydmuchanie.
- Pozostałą ilość roztworu należy wylać, a zestaw umyć.
- Do każdego płukania przygotuj świeży roztwór.

Skład

Każda saszetka zawiera chlorek sodu (2,16 g).

Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- W oryginalnym opakowaniu.
- Chronić przed światłem i wilgocią.
- Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.
- Nie stosować po upływie terminu przydatności do użycia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną.
- Nie należy stosować zestawu w przypadku całkowitej blokady nosa, nieprawidłowego ustawienia przegrody nosowej, infekcji ucha.
- Po operacji uszu, przed zastosowaniem zestawu, należy skonsultować się z lekarzem.
- Do płukania nie stosować gorącej wody ani nieprzegotowanej wody z kranu.
- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do opakowania.