

ClinSin Med, zestaw uzupełniający co płukania zatok, 30 saszetek



Cena: 14,50 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 saszetek
Postać	proszek do sporządzenia roztworu
Producent	N.P.ZDROVIT SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Opis

ClinSin Med, zestaw uzupełniający co płukania zatok, wyrób medyczny przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia. Służy do przygotowania roztworu do płukania jamy nosowej i zatok, w celu:

- oczyszczania,
- pielęgnacji,
- prewencji,
- przy objawach pooperacyjnych nosa i zatok.

Z ClinSin Med można przygotować roztwór izotoniczny i hipertoniczny.

Zastosowanie

- Zapalenie zatok przynosowych.
- Nieżyt nosa różnego pochodzenia (alergia, infekcje).
- Zabiegi chirurgiczne nosa i zatok (przed i po).
- Wysokiego zapalenia lub nadmiernie przesuszonego powietrza, którym oddychamy.
- Wsuszenia śluzówki nosa po stosowaniu leków donosowych.
- Utrzymanie właściwej higieny nosa.

Sposób użycia

- Płukanie należy wykonywać 1-2 razy dziennie z zachowaniem co najmniej 1 godziny przerwy między płukaniem nosa i zatok a wyjściem na dwór (przy temperaturze poniżej 19°C) lub pójściem spać.
- Przed zastosowaniem należy uważnie przeczytać instrukcję użycia dołączonej do opakowania.

- Zawartość 1 saszetki (lub 2 dla roztworu hipertonicznego) wsyp do irygatora i uzupełnij ciepłą wodą do poziomu 240 ml.
- Zakręć dokładnie butelkę, zatkać otwór w nakrętce palcem i wstrząśnij irygatorem do uzyskania klarownego roztworu.
- Stań w pozycji nachylonej nad umywalką. Oddychając swobodnie przez usta przyłóż końcówkę nakrętki irygatora do jednego otworu nosa. Płynnie ściśnij butelkę tak, aby połowa roztworu dostała się do otworu nosowego. Nie uciskaj drugiego otworu, musi on pozostać otwarty, aby wypływająca woda wraz z wydzielinami miała ujście na zewnątrz jamy nosowej. To samo powtórz dla drugiego otworu nosa.
- Nie połykaj roztworu.
- Po płukaniu oczyść nos chusteczką jednorazową poprzez wydmuchanie.
- Pozostałą ilość roztworu należy wylać, a zestaw umyć.
- Do każdego płukania przygotuj świeży roztwór.

Skład

Każda saszetka zawiera chlorek sodu (2,16 g).

Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W oryginalnym opakowaniu.
- Chronić przed światłem i wilgocią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną.
- Nie stosować w przypadku całkowitej blokady nosa, nieprawidłowego ustawienia przegrody nosowej, infekcji ucha.
- Po operacji uszu lub nosa, przed zastosowaniem zestawu należy skonsultować się z lekarzem.