


# Corega Max Czyszczenie, tabletki do czyszczenia protez zębowych, 30 tabletek

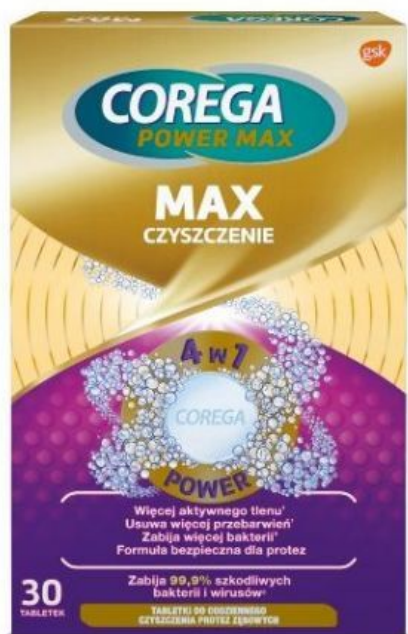

Cena: 14,90 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	30 tabletek
Postać	tabletki rozpuszczalne
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Opis produktu

Tabletki Corega Max Czyszczenie zapewniają szybkie, niezrównane czyszczenie twojej protezie zębowej częściowej i całkowitej. Dzięki formule aktywnego tlenu usuwa więcej przebarwień. Niszczą 99,99% bakterii będących przyczyną brzydkiego zapachu, w zaledwie kilka minut oraz redukują złogi płytki nazębnej. Jednocześnie są tak delikatne dla protezy zębowej, że mogą być stosowane codziennie.

### Sposób użycia

- Wlać do naczynia taką ilość ciepłej wody, nie gorącej aby można było zanurzyć protezę i wrzucić tabletkę,
- Włożyć protezę do roztworu i pozostawić na 3-5 minut, następnie szczotkować protezę miękką szczoteczką,
- Pozostały roztwór należy wylać,
- Dokładnie opłukać protezę pod bieżącą wodą.

### Składniki

Sodium Bicarbonate, Sodium Carbonate Peroxide Citric Acid, Potassium Caroate (Potassium Monopersulfate), Sodium Carbonate, TAED, Sodium Benzoate, PEG-180, Sodium Lauryl Sulfate, VP/A Copolymer, Aroma, Cellulose Gum, CI 42090, CI 73015, CI 19140.