


# Criorectum, sztyft krioterapeutyczny, 1 sztuka

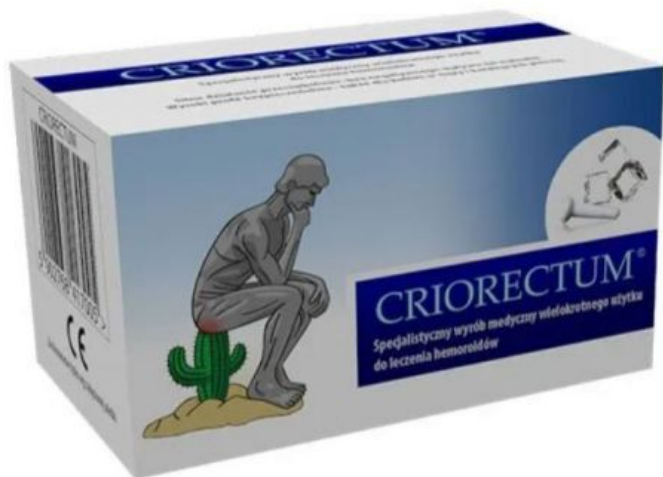

Cena: 53,99 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Producent	PHU MARSYLSKA SYLWIA SARNOWSKA GĘBISZ
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

### Opis

Criorectum, sztyft krioterapeutyczny, wskazany do leczenia hemoroidów wewnętrznych i zewnętrznych. Kuracja jest w 100% naturalna i bezbolesna. Sztyft nie wywołuje żadnych reakcji alergicznych, a anatomiczny kształt oraz niska temperatura korzystnie wpływają na ustąpienie dolegliwości takich jak: pieczenie, świąd, krwawienie, ból, obrzęk.

### Zastosowanie

- Leczenie hemoroidów wewnętrznych i zewnętrznych.
- Szczelina odbytu.
- Przeciwbólowo, po zabiegach chirurgicznych okolic odbytu.
- Dla kobiet w ciąży i karmiących piersią z dolegliwościami hemoroidalnymi.

### Sposób użycia

Sztyft należy przechowywać w zamrażalniku lodówki lub w zamrażarce wolnostojącej, w pozycji pionowej. Minimalny czas schładzania wynosi 2 godz. Przed każdą aplikacją sztyft należy posmarować lubrykantem, ułatwiającym wprowadzenie aplikatora do odbytu. Sztyft aplikować doodbytniczo, leżąc na boku. Głębokość aplikacji wyznacza ogranicznik. Czas pojedynczej aplikacji powinien wynosić ok. 8 min. Po tym czasie sztyft wyciągnąć, umyć pod bieżącą, ciepłą wodą z mydłem. Osuszyć, przetrzeć środkiem dezynfekującym i ponownie umieścić w zamrażalniku. Ze względów higienicznych, należy przechowywać sztyft w załączonym pojemniku. Należy aplikować minimum dwa razy dziennie, przez okres minimum 14 dni. Po ustąpieniu wszelkich objawów chorobowych, zaleca się stosowanie sztyftu profilaktycznie, jeden raz w tygodniu.

### Skład

Opakowanie zawiera: sztyft krioterapeutyczny Criorectum, lubrykant, ulotkę.  
Skład lubrykantu: gliceryna kosmetyczna 100%.

### Przechowywanie

Ze względów higienicznych, należy przechowywać sztyft w załączonym pojemniku. Przed i po aplikacji Criorectum należy umyć ręce.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie zaleca się stosowania u dzieci.
- Jeżeli po 3 tygodniach stosowania Criorectum nie nastąpi żadna poprawa, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Produkt zachowuje swoje właściwości przez 6 miesięcy, od momentu pierwszego zamrożenia. Po tym czasie, zaleca się

wymianę sztyftu na nowy.