

DeflaGyn, żel dopochwowy, 150 ml + 2 aplikatory

Cena: 185,15 zł



Opis słownikowy

Cena jednostkowa	150 ml
Opakowanie	150 ml + 2 aplikatory
Producent	EXELTIS POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis produktu

Wyrób medyczny DeflaGyn, zestaw zawiera 150 ml żelu dopochwowego oraz 28 jednorazowych aplikatorów. Wyrób ten zalecany do stosowania w przypadku nieprawidłowego wyniku cytologii. Wspomaga spontaniczną remisję i regresję zmian. Składniki aktywne działają na czynniki wywołujące podrażnienie szyjki macicy. Adsorbują patogeny, co hamuje ich rozprzestrzenianie i wspierają działanie antyoksydacyjne.

Zastosowanie

Żel dopochwowy wspomagający spontaniczną remisję i regresję:

- nieprawidłowych wyników cytologii szyjki macicy (ASC-US (Atypowe komórki nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu), ASC-H (Atypowe komórki nabłonkowe, gdzie nie można wykluczyć obecności zmian HSIL), LSIL (Zmiany małego stopnia w komórkach nabłonka płaskiego), HSIL (Zmiany dużego stopnia w komórkach nabłonka płaskiego)/PAP II-p, PAP-III-p, PAP IIID1, PAP IIID2 (Munich III)/PAP III, PAP IIID);
- zmian na szyjce macicy wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV);
- zmian na szyjce macicy z dodatnim wynikiem biomarkerów p16/Ki-67;
- nienowotworowych zmian na szyjce macicy.

Sposób użycia

- Butelkę położyć na płaskiej powierzchni, odkręcić korek i włożyć końcówkę aplikatora do otworu butelki.
- Butelkę z aplikatorem należy obrócić o 180°. Nabrać 5 ml żelu, delikatnie pociągnąć tłok aplikatora do momentu kiedy koniec tłoka wskaże objętość 5 ml, następnie obrócić butelkę i zdjąć napełniony aplikator z butelki.
- Należy położyć się na plecach, umieszczając.
- Umieścić aplikator głęboko w pochwie i powoli wciskaj tłok.
- Wyjmij aplikator.
- Przez około 1 minutę pacjentka powinna pozostać w pozycji leżącej z uniesioną miednicą.
- Na koniec należy wyrzucić zużyty aplikator.

Skład

Jedno podanie zawiera: wysoce dyspergowany dwutlenek krzemu 10,0 mg, kwas cytrynowy 24,8 mg, selenian sodu 0,83 mg w przeliczeniu na selen 0,25 mg.

Substancje pomocnicze: hydroksyetyloceluloza, woda. Substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.

Przechowywanie

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- W miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Wstrząsnąć przed użyciem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Żel stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.
- Pacjentki niemiesiączkujące: żel należy stosować przez 3 okresy po 28 dni. Po 28 dniach przerwać stosowanie na 3 dni. Następnie kontynuować leczenie przez kolejne 28 dni i ponownie przerwać na 3 dni. Następnie kontynuować leczenie rozpoczynając 3 cykl leczenia.
- Pacjentki miesiączkujące: nie stosować w trakcie miesiączki. Nie trzeba stosować dodatkowych 3 dni przerwy, miesiączkę należy traktować jak przerwę w leczeniu.