

Diather Test Magni-Man Pro, test do oznaczania poziomu plemników, 1 sztuka



Cena: 34,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Postać	test diagnostyczny
Producent	DIATHER PETRUSEWICZ SP.K.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Diather Test Magni-Man Pro to domowy test do oznaczania zawartości plemników w próbce nasienia ludzkiego. Test jest środkiem pomocniczym w diagnostyce i obserwacji leczenia niepłodności u mężczyzn. Za pomocą testu określimy zawartość plemników w nasieniu w odniesieniu do wartości granicznych. Wynik testu wskazujący stężenie plemników niższe niż poziom testowy 15mln/ml, może wskazywać na oligozoospermie oraz czynnik męskiej niepłodności.

Wskazania

- Kontrola płodności u mężczyzn.
- Przebadanie nasienia.

Sposób użycia

Próbkę nasienia należy pozyskać poprzez stymulację ręczną (masturbację) bezpośrednio do załączonego do zestawu pojemnika. Następnie konieczna jest 15 minutowa inkubacja próbki nasienia w pojemniku w celu upłynnienia próbki, tak by było możliwe dalsze przeprowadzenie testu.

- Pobierz próbkę za pomocą kapilary dołączonej do zestawu.
- Wprowadź pobraną próbkę do oznaczonego mniejszego okienka w kasecie testowej.
- Wprowadź odczynnik do większego okienka w kasecie testowej.
- Odczekaj 2 minuty i odczytaj wynik.

Najlepszy czas na pobranie nasienia to 2-7 dni od ostatniej ejakulacji. Pobranie nasienia przed upływem 2 dni lub po 7 dniach od ostatniej ejakulacji może wpłynąć negatywnie na dokładność wykonanego testu. Nie należy do pobierania nasienia stosować prezerwatyw.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Ten produkt posiada oznaczenie CE. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadany przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ten produkt posiada oznaczenie CE o numerze jednostki notyfikowanej (0123).

- Ten produkt posiada deklarację zgodności UE - spełnia wymogi Unii Europejskiej.
- Jest to test do samokontroli.
- Do produktu dołączona jest etykieta i instrukcja obsługi w języku polskim.

Dodatkowe informacje

Zawartość opakowania:


- 1 saszetka z testem kasetkowym, pipetą nakraplającą
- 1 pojemniki na próbkę
- 1 pojemnik z zakraplaczem z roztworem barwiącym
- 1 pojemnik z zakraplaczem z roztworem płuczającym
- 1 statyw na próbki
- 1 karta z procedurą badania
- instrukcja użycia

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego


- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria

Zawartość zestawu

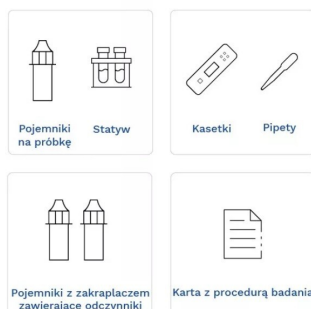

Schemat użycia

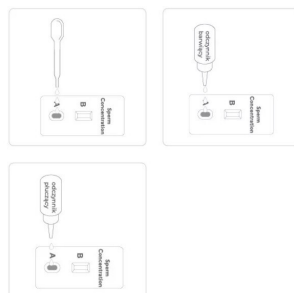

Interpretacja wyników

Prawidłowy



Odbiegający od normy

