

# Diather Test Magni-Man, test do oznaczania poziomu plemników, 2 sztuki



Cena: 43,99 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	2 sztuki
Postać	testy diagnostyczne
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Opis

Diather Test Magni-Man Pro to domowy test do oznaczania zawartości plemników w próbce nasienia ludzkiego. Test jest środkiem pomocniczym w diagnostyce i obserwacji leczenia niepłodności u mężczyzn. Za pomocą testu określimy zawartość plemników w nasieniu w odniesieniu do wartości granicznych. Wynik testu wskazujący stężenie plemników niższe niż poziom testowy 15mln/ml, może wskazywać na oligozoospermie oraz czynnik męskiej niepłodności.

### Wskazania

- Kontrola płodności u mężczyzn.
- Przebadanie nasienia.

### Sposób użycia

Próbkę nasienia należy pozyskać poprzez stymulację ręczną (masturbację) bezpośrednio do załączonego do zestawu pojemnika. Następnie konieczna jest 15 minutowa inkubacja próbki nasienia w pojemniku w celu upłynnienia próbki, tak by było możliwe dalsze przeprowadzenie testu.

- Pobierz próbkę za pomocą kapilary dołączonej do zestawu.
- Wprowadź pobraną próbkę do oznaczonego mniejszego okienka w kasecie testowej.
- Wprowadź odczynnik do większego okienka w kasecie testowej.
- Odczekaj 2 minuty i odczytaj wynik.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Najlepszy czas na pobranie nasienia to 2-7 dni od ostatniej ejakulacji. Pobranie nasienia przed upływem 2 dni lub po 7 dniach od ostatniej ejakulacji może wpłynąć negatywnie na dokładność wykonanego testu.
- Nie należy do pobierania nasienia stosować prezerwatyw.

### Dodatkowe informacje

Zawartość opakowania:


- 1 saszetka z testem kasetkowym, pipetą nakraplającą
- 1 pojemniki na próbkę
- 1 pojemnik z zakraplaczem z roztworem barwiącym
- 1 pojemnik z zakraplaczem z roztworem płuczącym
- 1 statyw na próbki
- 1 karta z procedurą badania
- instrukcja użycia

## Galeria

### Zawartość zestawu



### Schemat użycia

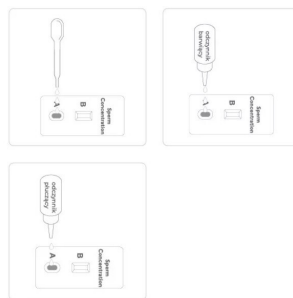

### Interpretacja wyników

