


Domowe Laboratorium CRP Test do diagnostyki infekcji i stanów zapalnych z krwi, 1 sztuka

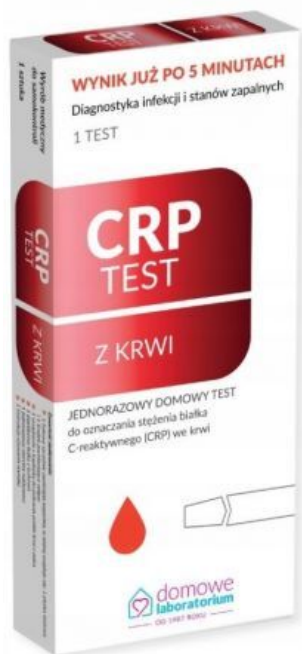

Cena: 29,88 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Opakowanie | 1 sztuka |
| Producent | HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K. |
| Rejestracja | wyrób medyczny inny |

Opis produktu

Opis

CRP test służy do półilościowego oznaczania stężenia białka C-reaktywnego w próbce krwi. Jeżeli w badanej próbce krwi znajduje się białko C-reaktywne, będzie zachodzić reakcja z przeciwciałami anty-CRP obecnymi w postaci odrębnych linii na płytce testowej. W zależności od poziomu stężenia CRP ukażą się odpowiednie prążki testowe. Test powinien być wykonany w przypadku wystąpienia objawów klinicznych wskazujących na infekcję, takich jak: stan podgorączkowy, bóle głowy, gorączka, czy ogólne osłabienie.

Zastosowanie

Test do oznaczania stężenia białka C-reaktywnego (CRP) we krwi.

Sposób użycia

- Zdjąć nasadkę ochronną przekręcając ją o 90 stopni i docisnąć nakłuwacz do palca.
- Do powstałej krwi przyłożyć kapilarkę i poczekać aż się napełni.
- Włożyć część urządzenia z kapilarką wypełnioną krwią do fiolki z buforem, potrząsnąć przez 10 sekund i zostawić na 1 minutę.
- Następnie nanieść na płytkę 3 pełne krople roztworu i wynik odczytać po 5 minutach.

Przechowywanie

- Opakowanie z testem przechowywać w temperaturze 2-30oC. Nie zamrażać.
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Dodatkowe informacje

- Ten produkt posiada oznaczenie CE. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadany przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ten produkt posiada oznaczenie CE o numerze jednostki notyfikowanej (1434).

Ten produkt posiada deklarację zgodności UE - spełnia wymogi Unii Europejskiej.

- Jest to test do samokontroli.
- Do produktu dołączona jest etykieta i instrukcja obsługi w języku polskim.

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.