

# Domowe Laboratorium FOB Test do wykrywania krwi utajonej w kale, 1 sztuka



Cena: 31,00 zł

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Rejestracja	wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### Wskazania

profilaktyka nowotworowa

### Stosowanie

Przed wykonaniem badania zapoznaj się ze szczegółową instrukcją dołączoną do testu

1. Odkręć niebieską nakrętkę pojemnika z płynem
2. Wkręć końcówkę aplikatora w 3 różne miejsca badanego kału
3. Wprowadź końcówkę z powrotem do pojemnika
4. Wstrząśnij pojemnikiem, odkręć białą nakrętkę i odłam końcówkę
5. Nanieś próbkę na płytkę i odczytaj wynik po 5 min

Zobacz jak wykonać test oraz interpretować wyniki na: [www.youtube.com/domowelaboratorium](http://www.youtube.com/domowelaboratorium)

### Przeciwwskazania

Przechowywać z dala od dzieci

### Producent

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp.k.

### Opis

Domowe Laboratorium Zdrowe jelito FOB Test

### Dodatkowe informacje

- Ten produkt posiada oznaczenie CE. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadany przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ten produkt posiada oznaczenie CE o

numerze jednostki notyfikowanej (1434).

Ten produkt posiada deklarację zgodności UE - spełnia wymogi Unii Europejskiej.

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Jest to test do samokontroli.
- Do produktu dołączona jest etykieta i instrukcja obsługi w języku polskim.

#### **Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego**

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.