

Domowe Laboratorium Pink Domowy test ciążowy strumieniowy super czuły, 1 sztuka



Cena: 8,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Test ciążowy Pink Strumieniowy Super Czuty to wysoce precyzyjne, jednorazowe, domowe badanie, którego przeprowadzenie jest bardzo szybkie i proste. Wykonanie badania testem jest bardzo proste, wystarczy końcówkę testu skierować pod strumień moczu, a wynik w postaci barwnych prążków w okienku wynikowym uzyskuje się w czasie 1-4 minut.

Zastosowanie

Test ciążowy strumieniowy.

Sposób użycia

- Wprowadź końcówkę testu pod strumień moczu na 10 sekund,
- Odczekaj 1-4 minut i odczytaj wynik,
- Jeden prążek oznacza, że nie jesteś w ciąży,
- Dwa prążki oznaczają, że jesteś w ciąży.

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

- Ten produkt posiada oznaczenie CE. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadany przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ten produkt posiada oznaczenie CE o numerze jednostki notyfikowanej (1434).
- Ten produkt posiada deklarację zgodności UE - spełnia wymogi Unii Europejskiej.
- Jest to test do samokontroli.

- Do produktu dołączona jest etykieta i instrukcja obsługi w języku polskim.

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.