

Domowe Laboratorium Test narkotykowy, domowy test do wykrywania narkotyków w ślinie, 1 sztuka



Cena: 41,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	HYDREX PRZED.TECH.HANDL.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Test narkotykowy ze śliny, to domowy, szybki test do wykrycia nielegalnych substancji w organizmie: morfiny, heroiny, amfetaminy, marihuany, haszyszu i kokainy. Test należy stosować wówczas, gdy nie wiadomo dokładnie, który z narkotyków został użyty.

Zastosowanie

Wykrycie nielegalnych substancji w organizmie: morfiny, heroiny, amfetaminy, marihuany, haszyszu i kokainy.

Sposób użycia

- Pobrać ślinę z ust za pomocą próbnika,
- Ślinę wycisnąć do pojemnika wyposażonego w nakrętkę z dozownikiem, z którego trzeba wprowadzić po 3 krople śliny, do każdego z dwóch pól reakcyjnych znajdujących się na płytce testowej,
- Wyniki testu odczytujemy po 10 minutach, ich wiarygodność utrzymuje się do 20 minut.
- Dodatni wynik oznacza się jako jeden barwny prążek widniejący w strefie kontrolnej C, co jednoznacznie świadczy o wykryciu śladu narkotyku w organizmie badanej osoby,
- Obecność morfiny, heroiny i kokainy w ślinie wykrywana jest przez 12-24 godziny od zażycia narkotyków, amfetaminy 20-50 godzin, a marihuany i haszyszu ok. 14 godzin.

Dodatkowe informacje

- Ten produkt posiada oznaczenie CE. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadany przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ten produkt posiada oznaczenie CE o numerze jednostki notyfikowanej (1434).
- Ten produkt posiada deklarację zgodności UE - spełnia wymogi Unii Europejskiej.
- Jest to test do samokontroli.

- Do produktu dołączona jest etykieta i instrukcja obsługi w języku polskim.

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.