


Domowe Laboratorium, Test owulacyjny, domowy test do wykrywania dni płodnych, 1 opakowanie, 25 testów

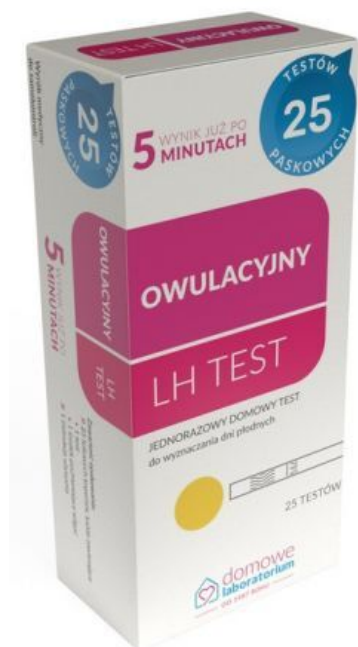

Cena: 44,00 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	25 szt
Opakowanie	25 sztuk
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Test owulacyjny, domowy test do wykrywania dni płodnych, to diagnostyczny test paskowy do domowego użytku, wykrywający tzw. pik LH, czyli nagły skok stężenia hormonu luteinizującego w moczu kobiety (minimum 30 mIU/ml), poprzedzający owulację, który wyznacza najdoskonalszy moment na poczęcie w całym cyklu miesięcznym kobiety. Przeprowadzenie badania polega na pobraniu próbki moczu do suchego i czystego pojemnika, a następnie zanurzenia w nim paska testowego. W

Wyniki otrzymujemy po 5 minutach. Na ich odczytanie mamy jednak niewiele czasu, najlepiej jest to zrobić w ciągu jednej minuty, ponieważ później stają się one niewiarygodne. Do analizy nie używamy pierwszego moczu porannego. Na 2 godziny przed badaniem nie powinno się również przyjmować żadnych płynów aby wynik nie był przekłamany.

Zastosowanie

Jednorazowy domowy test do wyznaczania dni płodnych.

Sposób użycia

- Otwórz foliową kopertę i wyjmij pasek testowy, trzymając jedynie za jego górną część i nie dotykając pozostałej części testu. Znajdujący się również w kopercie środek pochłaniający wilgoć należy wyrzucić do śmieci.
- Włóż pasek testowy do wcześniej przygotowane próbki moczu na odpowiednią głębokość (do tzw. linii MAX). Po upływie 10-15 sekund wyjmij pasek testowy z pojemnika i połóż go na poziomej powierzchni płaskiej.
- Monitoruj przemieszczanie się próbki moczu przez strefę testową (T) oraz strefę kontrolną (C) na pasku testowym. Poczekaj, aż pojawią się na nim barwne prążki. Wynik badania możesz odczytać po upływie 5 minut od momentu zanurzenia paska w próbce moczu.

Dodatkowe informacje

- Ten produkt posiada oznaczenie CE. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadany przez producenta i uznany za

spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ten produkt posiada oznaczenie CE o numerze jednostki notyfikowanej (1434). Ten produkt posiada deklarację zgodności UE - spełnia wymogi Unii Europejskiej.

- Jest to test do samokontroli.
- Do produktu dołączona jest etykieta i instrukcja obsługi w języku polskim.

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykieta.