


# Domowe Laboratorium THC Strip, jednorazowy domowy test paskowy do wykrywania kanabinoidów i ich metabolitów (THC) w moczu, 1 sztuka

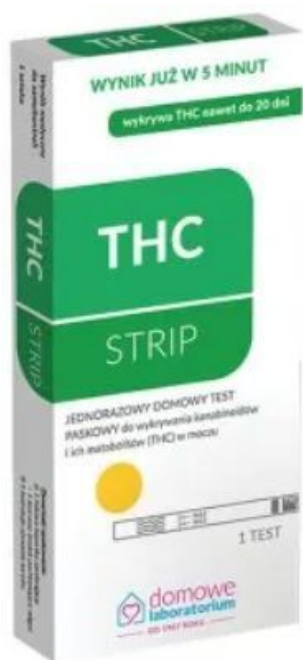

Cena: 14,99 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Opis

Domowe Laboratorium THC Strip, paskowy test jednorazowy przeznaczony do domowego użytku, test narkotykowy służący do wykrywania obecności marihuany lub haszyszu w moczu. Test charakteryzuje się czułością 50 ng/ml i w szybki sposób wykrywa kanabinoidy i metabolity zawarte w moczu osób zażywających marihuanę lub haszysz. THC utrzymuje się w organizmie człowieka przez 5-20 dni od przyjęcia narkotyku. W teście z wynikiem dodatnim pojawia się tylko jeden różowy prążek w strefie kontrolnej C.

### Zastosowanie

Test narkotykowy paskowy do wykrywania kanabinoidów i ich metabolitów (THC) w moczu.

### Sposób użycia

- Do wykonania potrzebna jest próbka pobranego do czystego i suchego pojemnika moczu. Można go oddać o dowolnej porze dnia. Jeśli natychmiastowe przeprowadzenie badania nie jest możliwe, próbkę można przechować przez 48 godzin w temperaturze 2-8 °C. W takiej sytuacji przed dokonaniem diagnozy należy doprowadzić go do temperatury pokojowej.
- Bezpośrednio przed wykonaniem badania otwórz foliową kopertę
- Test wyjmij, chwytając za jego górną, nadrukowaną część. Nie możesz dotknąć innych jego części.
- Obecny w kopercie środek do pochłaniania wilgoci wyrzuć do śmieci.
- Chwyć pasek testowy i powoli zanurz w próbce moczu, aż osiągnięta zostanie linia maksymalnego zanurzenia. Po upływie 10-15 sekund ostrożnie wyjmij go z próbki i umieść na płaskiej, poziomej powierzchni.
- Zwróć uwagę na pojawiające się barwne prążki. Wyniki testu należy odczytać pod koniec 5. minuty, licząc od zanurzenia paska w próbce moczu.
- Po upływie 15 minut od badania intensywność prążków może ulec zmianie lub może pojawić się nowy pasek. Nie należy brać pod uwagę takich wyników.

#### Dodatkowe informacje

- Wynik ujemny: w badanym moczu nie stwierdzono obecności narkotyków, gdy w polu testowym pojawiają się dwa barwne prążki – w strefie testowej T oraz w strefie kontrolnej C.
- Wynik dodatni: jeden barwny prążek w strefie kontrolnej C oznacza pozytywny wynik potwierdzający obecność narkotyków w moczu badanego.
- Wynik nieważny: brak reakcji lub samodzielne wystąpienie paska testowego T sygnalizuje nieważny wynik badania. Cały proces należy powtórzyć z wykorzystaniem nowego zestawu diagnostycznego.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Ten produkt posiada oznaczenie CE. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadany przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ten produkt posiada oznaczenie CE o numerze jednostki notyfikowanej (1434).
- Ten produkt posiada deklarację zgodności UE - spełnia wymogi Unii Europejskiej.
- Jest to test do samokontroli.
- Do produktu dołączona jest etykieta i instrukcja obsługi w języku polskim.

#### Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.