

Durex Mutual Pleasure, prezerwatywy, 10 sztuk



Cena: 39,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	10 sztuk
Postać	prezerwatywy
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Durex Mutual Pleasure, prezerwatywy przezroczyste z naturalnego lateksu o kształcie Easy-on, zakończone zbiorniczkiem, z wypustkami i prążkami. Rozmiar: standardowe (szerokość nominalna 56 mm).

Sposób użycia

- Używaj prezerwatywy tylko raz. Wyrzuć folijkę i zużytą prezerwatywę do kosza. Nie wyrzucaj do toalety.
- Aby ułatwić założenie logo Durex na folijce wskazuje spód prezerwatywy.

Przechowywanie

- W miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego.
- W miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

- Używaj tylko tych żeli intymnych, które są odpowiednie do używania z prezerwatywami. Do seksu analnego zastosuj żel intymny na zewnątrz prezerwatywy.
- U niektórych osób lubrykant Performa, znajdujący się na tych prezerwatywach, może powodować wysypkę, podrażnienie, pieczenie lub swędzenie.
- Unikaj kontaktu z oczami i zmyj po użyciu. Jeśli wystąpi podrażnienie, zaprzestań używania prezerwatyw Performa. Jeśli nie nastąpi poprawa skonsultuj się z lekarzem. - Nie używaj, jeśli u Ciebie lub partnera(ki) występuje stan zapalny lub uszkodzenie skóry.
- Natychmiast przestań używać i wezwij lekarza, jeśli w trakcie używania wystąpią trudności w oddychaniu lub zasinienie ust.
- Przedwczesny wytrysk jest częstym problemem, który może mieć wiele przyczyn i może wymagać konsultacji/opieki medycznej. Jeśli te prezerwatywy nie pomogą, skontaktuj się z lekarzem.
- Przeczytaj instrukcję używania, zwłaszcza jeśli używasz prezerwatyw do seksu analnego lub oralnego.

- Żadna metoda antykoncepcji nie chroni w 100% przed ciążą, HIV lub chorobami przenoszonymi drogą płciową.