

Excilor 2w1 Leczenie Brodawek i Kurzajek, 1 sztuka



Cena: 44,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 opakowanie
Postać	sztyft
Producent	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

Excilor Leczenie Brodawek i Kurzajek 2w1 to wyrób medyczny do samodzielnego stosowania w celu skutecznego szybkiego leczenia brodawek, jak i kurzajek. Excilor Leczenie Brodawek i Kurzajek 2w1 leczy brodawkę/kurzajkę zarówno od wewnątrz poprzez zamrażanie, jak i na zewnątrz terapią kwasową. Niebieski zbiornik, zawierający środek zamrażający (Cryo-Active) oraz biały aplikator, zawierający żel (TCA-Active) łączą krioterapię oraz terapię kwasową w jednym urządzeniu. Jest to połączenie dwóch najczęstszych metod leczenia dla uzyskania szybszych rezultatów. Może być stosowany przez dorosłych i dzieci powyżej 4 roku życia.

Zastosowanie

- Brodawki zwykłe (Verruca Vulgaris)- występują najczęściej na dłoniach, palcach dłoni lub palcach stóp,
- Brodawki stóp (Verruca Plantaris)- występujące na podszewkach stóp, lub piętach, zwykle są bardziej płaskie, twardsze i często bolesne.

Sposób użycia

- 1 cykl leczenia trwa 5 dni. W 1. dniu leczenia stosuje się tylko krioterapię, kolejne 4 dni to terapia kwasowa, którą należy przeprowadzać 2 razy dziennie (w przypadku dzieci 4-12 lat wystarczy 1 raz dziennie). Jeżeli brodawka nie odpadnie całkowicie, można powtórzyć leczenie dwukrotnie (zachowując 4-7 dniowy odstęp między kolejnymi kuracjami).
- Cykl leczenia trwa 5 dni. W razie potrzeby cykl leczenia można powtórzyć do 3 razy, stosując między każdym cyklem 4-7 dni przerwy.

Skład

Zawiera dwa produkty: jeden zbiornik z substancją zamrażającą (Cryo-Active 11,5 ml), uchwyt z pianką oraz jeden aplikator żelu TCA-Active (na bazie kwasu trichlorooctowego 1 ml).

Przeciwwskazania

Nie stosować:

- Jeśli brodawka znajduje się na obszarze ciała innym niż dłoń lub stopa;
- Na krwawiącą, podrażnioną, zaczerwienioną skórę lub skórę wykazującą jakiegokolwiek oznaki stanu zapalnego, takie jak świąd lub obrzęk;
- Na brodawki starcze, pieprzyki, ciemne plamy na skórze, pęgi, brodawki wodne (mięczak zakaźny), brodawki łojotokowe (verruca seborrhoica) lub złuszczone naskórek
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy dana zmiana skórna jest kurzajką
- W przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Dodatkowe informacje

Po pierwszym otwarciu produkt należy zużyć w ciągu 6 miesięcy