

## Ferti-Lily, kubeczek wspomagający zapłodnienie, 1 sztuka



Cena: 149,90 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Producent	SALVEO POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

### Opis produktu

#### Opis produktu

Ferti-Lily kubeczek wspomagający zapłodnienie umieszcza się w pochwie po stosunku zakończonym ejakulacją, co utrzymuje nasienie blisko szyjki macicy, w środowisku śluzu szyjkowego. Kubeczek Ferti-Lily dostarcza większą ilość nasienia do szyjki macicy, a tym samym zwiększa szansę na zapłodnienie. Wykonany jest w 100% z silikonu medycznego. Kubeczek jest elastyczny, trwały, biodegradowalny, bezpieczny i łatwy w aplikacji. Można używać go wielokrotnie w okresie do 6 cykli. Badania kliniczne potwierdzają, że kubeczek Ferti-lily zwiększa szansę na zajście w ciążę o 48%, dostarczana jest większa ilość nasienia do szyjki macicy, a tym samym zwiększa się szansa na zapłodnienie.

#### Sposób użycia

- Przed pierwszym użyciem, wygotuj kubeczek w czystej wodzie, osusz go.
- Uprawiajcie seks.
- Gdy nasienie partnera znajdzie się w pochwie, nie siadając ani nie wstając, sięgnij po kubeczek. Wywiń kubeczek tak, by wyglądał jak parasol.
- Trzymaj kubeczek za ogonek skierowany w stronę Twoich stóp, przytrzymuj go również palcem wewnątrz wywiniętego kubeczka.
- Delikatnie wsuń wywinięty kubeczek głęboko do pochwy. Kiedy będzie na miejscu, przytrzymaj go palcem, a jednocześnie drugą ręką lekko pociągnij za ogonek tak, by kubeczek wrócił do pierwotnego kształtu.
- Aby upewnić się, że kubeczek został umieszczony prawidłowo, poszukaj wgłębień, które znajdują się po obu stronach ogonka. Jeśli kubeczek nadal jest wywinięty, nie będziesz w stanie ich wyczuć.
- Kubeczek można nosić od 20 minut do 1 godziny.

#### Wyjmowanie kubeczka:

- Przyjmij wygodną pozycję stojącą lub usiądź na toalecie i delikatnie wypchnij kubeczek siłą mięśni dna miednicy (podobnie jak podczas wypróżniania).
- Chwyć ogonek kubeczka palcami.

- Powoli ciągnij za ogonek, aż poczujesz, że dno kubeczka znajduje się u wejścia do pochwy.
- Chwyć palcami zagłębienia w ogonku kubeczka i ściśnij go tak, aby zwinął się i stał łatwiejszy do wyjęcia. Możesz też chwycić jednym palcem brzeg kubeczka. Delikatnie wyjmij kubeczek z pochwy, trzymając go w pozycji pionowej, aby uniknąć wylania zawartości, zanim znajdzie się nad toaletą lub umywalką.
- Opróżnij kubeczek, umyj go dokładnie (15-20 sekund) z użyciem ciepłej wody.

#### Dodatkowe informacje

- Kubeczek może znajdować się wewnątrz ciała nawet przez godzinę po ejakulacji.
- Po włożeniu kubeczka można normalnie korzystać z toalety czy prysznica.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować jeśli stwierdzono infekcję drożdżakową lub bakteryjną.

#### Galeria



ODBAJ  
STOSUNEK



WYWIN  
KUBECZEK



WSUN



POCZEKAJ 20 MIN



USUN



UMYJ KUBECZEK