

Granuflex Bordered 10 cm x 10 cm, opatrunek hydrokoloidowy, 1 sztuka



Cena: 8,86 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Producent	CONVATEC POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Emplastri hydrocolloidosa

Opis produktu

Zastosowanie

Granuflex Bordered może być stosowany:

- Na rany przewlekłe (owrzodzenia podudzi na tle niewydolności żylniej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe),
- Na rany świeże, w okolicach narażonych na łatwe odklejenie się opatrunku,
- We wszystkich etapach leczenia, również w ranach z martwicą suchą lub rozplywną.

Sposób użycia

- Nakładać tak, aby jego wewnętrzna część wystawała około 1-2 cm na zewnątrz rany.
- Nie utrzymywać na ranie dłużej niż 7 dni, a w ranach zakażonych do 3 dni.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować przy uczuleniu na składniki opatrunku.