

## Gruszka z kanką nr 9 Kej, 1 sztuka



Cena: 11,69 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Producent	PPHU KEJ SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

### Opis produktu

#### Opis

Gruszka z kanką, przeznaczona do wykonywania lewatywy doodbytniczo zarówno u dzieci jak i dorosłych w celu łagodzenia zaparć, kolek brzusznych, przed zabiegami w okolicy jamy brzusznej. Dzięki zastosowaniu kanki jest ona łatwa w użyciu i higieniczna.

#### Sposób użycia

Przed każdym użyciem gruszki z kanką do wykonania lewatywy jak i po jej zakończeniu, należy starannie ją umyć w ciepłej wodzie z mydłem, oddzielając kankę od gruszki. Wymyte części wygotować w wodzie przez 10 minut. Następnie zamontować kankę, wkładając jej krótszy koniec do otworu gruszki, aż do oparcia się kołnierza kanki o krawędź gruszki. Napełnić roztworem zalecanym przez lekarza. Zastosowana ciecz powinna mieć temperaturę od 32° C do 34° C. Kankę posmarować cienką warstwą wazeliny kosmetycznej i powoli wprowadzać do odbytu bez wywierania ucisku, po czym nacisnąć gruszkę w taki sposób, aby opróżnić jej zawartość do jelita. Po wykonaniu tej czynności ścisnąć pośladki i wyjąć kankę z odbytu.

#### Przechowywanie

W czystym i suchym miejscu.

#### Dodatkowe informacje

- Wszelkie czynności związane z zastosowaniem gruszek powinny wykonywać osoby dorosłe.
- Gruszka jest wyrobem indywidualnego użytku.