

Gum Ortho, wosk ortodontyczny, 1 sztuka



Cena: 9,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Postać	wosk
Producent	SUNSTAR EUROPE S.A.
Rejestracja	wyrób medyczny inny
Wiek	od 7 roku życia

Opis produktu

Opis produktu

Gum Ortho, wosk ortodontyczny to wyrób medyczny chroniący tkanki błony śluzowej jamy ustnej przed powstawaniem zmianom chorobowym. Chroni policzki, wargi i dziąsła przed ostrymi drutami i zamkami aparatów ortodontycznych. Wosk Gum Ortho działa jak bariera ochronna zwiększając komfort użytkowania aparatów. Wosk przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 7 roku życia pod nadzorem dorosłych.

Wosk Gum Ortho jest fabrycznie podzielony na łatwe w użyciu małe kawałki składający się z 5 naciętych pasków wosku na papierze woskowanym w plastikowym etui.

Zastosowanie

Zalecany w celu stworzenia bariery ochronnej na zamkach i drutach, aby poprawić poziom komfortu podczas leczenia ortodontycznego.

Sposób użycia

- Umyj i osusz ręce.
- Wysusz miejsce aplikacji, aby uzyskać optymalną przyczepność.
- Oderwij kawałek wosku Gum Ortho, ogrzej go i uformuj między palcami.
- Nałóż wosk na druty i zamki powodujące dyskomfort poprzez delikatne naciśnięcie.
- Usuń wosk przed jedzeniem lub myciem zębów.
- Następnie nałóż nowy fragment wosku.
- Wosk może zostać na aparacie przez noc.
- Po zużyciu, wosk należy wyrzucić do odpadków domowych.

Składniki

Microcrystalline Wax, Paraffn Wax, Paraffn Liquid Wax.

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

- Okres stosowania może wynosić do 30 kolejnych dni.
- W przypadku utrzymywania się zmian lub podrażnień należy skonsultować się z lekarzem ortodontą.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników zawartych w produkcie.
- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.