

Hyabak UD krople do oczu w minimsach, 30 pojemników jednodawkowych



Cena: 39,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	1,5 mg/ml
Opakowanie	30 poj. 0,4ml (jednodawkowe)
Postać	krople do oczu
Producent	THEA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	Natrii hyaluronas

Opis produktu

Opis

Hyabak to nawilżające krople do oczu i soczewek kontaktowych z filtrem UV i kwasem hialuronowym.

Zastosowanie

- Zapewnia natychmiastową ulgę i zwiększa komfort dla oczu przez cały dzień
- Pomaga zwalczyć podrażnienia, zmęczenie i suchość oczu, wrażenie piasku pod oczami

Ułatwia używanie, zakładanie i zdejmowanie soczewek kontaktowych. może być stosowany bezpośrednio na szkła kontaktowe.

- Nie zawiera konserwantów i fosforanów

Sposób użycia

Jedną kroplę HYABAK należy wkraplać do każdego oka tak często, jak jest to konieczne. Użytkownicy soczewek kontaktowych mogą nanosić preparat na wklęsłą część soczewki podczas jej zakładania lub zdejmowania.

Skład

Hialuronian sodu, chlorek sodu, aktinokinol, trometamol, kwas chlorowodorowy, woda do wstrzykiwań.

Przechowywanie

- Otwarte fiołki należy wyrzucić natychmiast po zastosowaniu produktu.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Nieotwarty pojemnik jednodawkowy może być użyty w ciągu 2 miesięcy po pierwszym otwarciu saszetki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
- Nie dotykać końcówką fiołki do powierzchni oka.
- Nie wstrzykiwać ani nie połykać.
- Stosowanie kropli nie zastępuje noszenia okularów przeciwsłonecznych.
- Nie stosować, jeśli fiołki są uszkodzone.
- Otwarte fiołki należy wyrzucić natychmiast po zastosowaniu produktu.

Dodatkowe informacje

W przypadku stosowania kilku preparatów do oczu należy zachować przynajmniej 10 minut przerwy pomiędzy zakraplaniem kolejnych preparatów.