

Hydrosorb Gel, hydrożel, 5 sztuk po 8 g



Cena: 49,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	5 szt. po 8 g
Postać	żel
Producent	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis produktu

Hydrosorb Gel, jałowy opatrunek do ran chronicznych to przezroczysty hydrożel na bazie roztworu Ringera, który natychmiast po wprowadzeniu do rany, tworzyw niej wilgotne środowisko, rozmiękcza suchą tkankę martwiczą ułatwia jej usunięcie. Minimalizuje ból podczas zmiany opatrunku. Dzięki formie opakowania w pojedyncze tubki aplikacja żelu jest higienicznie czysta i precyzyjna.

Zastosowanie

Opatrunek do ran chronicznych Hydrosorb Gel stosowany do wilgotnej terapii ran chronicznych, głównie głębokich, lecz także powierzchniowych, o małym wysięku lub prawie suchych, we wszystkich fazach gojenia. Polecany do zmiękczenia tkanki martwiczej oraz do uwodnienia głębokich ran chronicznych w fazie ziarninowania. Do stosowania w przypadkach oparzeń do stopnia 2b. Może być łączony ze wszystkimi rodzajami opatrunków.

Sposób użycia

- Ranę przemyć sterylnym roztworem, następnie osuszyć skórę wokół rany.
- Wyciągnąć sterylną strzykawkę z opakowania i usunąć kołpak ochronny.
- Trzymając końcówkę strzykawki w pewnej odległości od rany pokryć ranę około 5-milimetrową warstwą żelu.
- Na ranę nałożyć odpowiedni opatrunek wtórny.

Częstotliwość zmian opatrunku zależy od stanu rany. Hydrosorb Gel może pozostać na ranie maksymalnie przez 3 dni.

Składniki

Woda z elektrolitycznym składem na bazie roztworu Ringera, gliceryna, hydroksyceluloza, celuloza, carbomer.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

