

Hydrosorb Gel, jałowy opatrunek do ran chronicznych, 15 g, 1 sztuka

Cena: 28,99 zł



Opis słownikowy

Dawka	15 g
Opakowanie	1 szt.
Postać	żel
Producent	HARTMANN PAUL A.G.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Hydrosorb Gel, jałowy opatrunek do ran chronicznych to przezroczysty hydrożel, który natychmiast po wprowadzeniu do rany, tworzyw niej wilgotne środowisko, rozmiękcza suchą tkankę martwiczą ułatwia jej usunięcie. Minimalizuje ból podczas zmiany opatrunku. Dozownik w formie strzykawki z podwójną podziałką, umożliwiającą bardzo dokładny odczyt zarówno ilości oddanej do rany, jak i pozostałej w strzykawce, zapewnia precyzyjne dozowanie żelu oraz ułatwia prowadzenie dokumentacji rany;

Zastosowanie

Opatrunek do ran chronicznych Hydrosorb Gel stosowany do wilgotnej terapii ran chronicznych, głównie głębokich, lecz także powierzchniowych, o małym wysięku lub prawie suchych, we wszystkich fazach gojenia. Polecany do zmiękczenia tkanki martwiczej oraz do uwodnienia głębokich ran chronicznych w fazie ziarninowania. Do stosowania w przypadkach oparzeń do stopnia 2b. Może być łączony ze wszystkimi rodzajami opatrunków.

Skład

Woda z elektrolitycznym składem na bazie roztworu Ringera, gliceryna, hydroksyceluloza, celuloza, carbomer

Sposób użycia

- Ranę przemyć sterylnym roztworem, następnie osuszyć skórę wokół rany.
- Wyciągnąć sterylną strzykawkę z opakowania i usunąć kołpak ochronny.
- Trzymając końcówkę strzykawki w pewnej odległości od rany pokryć ranę około 5-milimetrową warstwą żelu.
- Na ranę nałożyć odpowiedni opatrunek wtórny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Częstotliwość zmieniania opatrunku zależy od rany.
- Może pozostać na ranie maksymalnie 3 dni.
- Należy zmienić opatrunek w przypadku nasiąknięcia opatrunku wtórnego wydzieliną z rany.