

# Iridium Gauzes gaziki, 20 sztuk



Cena: 29,99 zł

## Opis słownikowy

Cena jednostkowa	20 szt.
Opakowanie	20 sztuk
Postać	gazik
Producent	FIDIA PHARMA POLSKA SP.Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Opis produktu

Iridium Gauzes to wyrób medyczny w postaci nasączonych sterylnych jednorazowych gazików, stosowanych we wspomaganiu leczenia schorzeń okolic oczu u dorosłych i dzieci.

Wykonana w 100% z bawełny tkanina nasączona naturalnymi składnikami, umożliwia całkowite usunięcie wydzielin, zanieczyszczeń i innych ciał obcych z okolic powiek i rzęs. Gaziki bcyh. Gaziki Iridium gauzes są zgodne pod względem fizyko-chemicznym z filmem łzowym, mają zrównoważone pH, nie pozostawiają osadów, a ich skład pozwala na ich codzienne stosowanie w celu utrzymania odpowiedniego stanu okolic oczu.

### Zastosowanie

Gaziki wskazane do usuwania z okolic powiek i rzęs strupów i wydzielin ocznych towarzyszących procesom zapalnym lub zakażeniom.

### Sposób użycia

- Po dokładnym umyciu rąk należy otworzyć saszetkę i wyjąć gazik.
- Przyłożyć gazik do okolicy powieki, delikatnie ją wycierając, pozwalając na odpowiednie usunięcie wydzielin ocznych i innych osadów.
- W przypadku szczególnie uporczywych wydzielin lub niedrożności kanału łzowego wskazane jest podgrzanie zamkniętej saszetki przez kilka minut w letniej wodzie (ok. 40°C), a następnie użycie gazika jako ciepłego kompresu, i wykonanie delikatnego masażu.
- Można również wycisnąć roztwór, którym nasączono gazik na zamknięte oko, lekko przechylając głowę, a następnie wykonać masaż oka gazikiem do momentu pełnego usunięcia obecnych zanieczyszczeń.
- W przypadku stanów zapalnych wskazane jest schłodzenie zamkniętej saszetki w lodówce przez kilka godzin, a następnie nałożenie na oko rozłożonego gazika - jako zimnego kompresu - i pozostawienie go na oku przez kilka minut.

### Składniki

100% gaza bawełniana nasączona roztworem zawierającym: glikol propylenowy, PPG-26-Buteth-26, uwodorniony olej rycynowy PEG-40, sól amonową kwasu glicyryzynowego, wyciąg glikolowy z Ananas sativus L., wyciąg z korzenia Echinacea angustifolia, E500 wodorowęglan sodu, dwuglukonian chlorheksydyny, hydroksymetyloglicynian sodu, edetynian dwusodowy i wodę oczyszczoną.

### Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

- Gaziki przeznaczone są do jednorazowego użytku. Ponowne użycie gazika może doprowadzić do zakażenia oka lub powstania urazu.
- W przypadku leczenia stanów zapalnych lub zakażeń oka nie należy stosować tego samego gazika do obojga oczu, aby uniknąć możliwości przeniesienia zakażenia pomiędzy oczami.