

Irigasin Junior Zestaw do płukania nosa i zatok, irygator + 12 saszetek



Cena: 22,41 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	12 saszetek (+ irygator)
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Wiek	od 4 roku życia

Opis produktu

Opis

Irigasin Junior to wyrób medyczny przeznaczony do przygotowania roztworu do płukania nosa i zatok. Zestaw składa się z irygatora w postaci miękkiej butelki zakończonej ergonomicznym aplikatorem oraz 12 saszetek. Zestaw ten umożliwia przygotowanie zarówno roztworu izotonicznego, jak i hipertonicznego, w zależności od potrzeb pacjenta.

- Roztwór izotoniczny działa nawilżająco na śluzówkę nosa wysuszoną w wyniku długotrwałego stosowania leków do nosa lub w następstwie przebywania w klimatyzowanych lub nadmiernie ogrzewanych pomieszczeniach.
- Hipertoniczny roztwór chlorku sodu, poza działaniem oczyszczającym, ze względu na większe stężenie substancji czynnej, wykazuje właściwości osmotyczne, dzięki którym zmniejsza obrzęk śluzówki. Jest więc zalecany w przypadku obrzęku nosa, towarzyszącego nieżytowi nosa w trakcie infekcji lub alergii (katar sienny), a także zapalenia zatok.

Zastosowanie

- Ostre lub przewlekłe zapalenie zatok przynosowych.
- Nieżyt nosa w przebiegu infekcji lub alergii.
- Przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok.
- Po ekspozycji na wysokie stężenie pyłu w powietrzu.
- Profilaktycznie dla utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok.

Sposób użycia

- Dzieci powyżej 4. roku życia: płukanie nosa i zatok należy wykonywać 1-2 razy dziennie lub według zaleceń lekarza. Dzieci mogą stosować wyrób jedynie pod kontrolą osoby dorosłej. Przed zastosowaniem wyrobu u dzieci poniżej 4. roku życia, należy skonsultować się z lekarzem.
- Przygotowanie roztworu izotonicznego: do butelki należy wsypać 1 saszetkę proszku i uzupełnić ją przegotowaną, ostudzoną

- wodą do zaznaczonej linii (120 ml).
- Przygotowanie roztworu hipertonicznego: do butelki należy wsypać 2 saszetki proszku i uzupełnić ją przegotowaną, ostudzoną wodą do zaznaczonej linii (120 ml).
 - Nie stosować w przypadku uszkodzenia butelki. Do każdego płukania należy przygotować świeży roztwór.

Skład

Chlorek sodu.

Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W oryginalnym opakowaniu.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.
- Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na chlorek sodu.
- Jeżeli objawy towarzyszące nieżytowi nosa lub zapaleniu zatok się nasilają należy skontaktować się z lekarzem.
- Nie stosować w przypadku całkowitej blokady nosa, uniemożliwiającej wydostanie się roztworu.
- Nie stosować w przypadku infekcji lub uczucia zatkania ucha.
- W przypadku przebytej operacji ucha przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.
- Po zakończeniu irygacji może pojawić się nieznaczny wyciek pozostałości roztworu z nosa przy pochylaniu.
- Nie stosować później niż na godzinę przed snem.
- Bezpośrednio po irygacji, przez godzinę dziecko nie powinno się kłaść, żeby pozostałości roztworu nie dostały się do ucha.
- Dzieci mogą stosować wyrób jedynie pod kontrolą osoby dorosłej.
- Możliwość stosowania u dzieci poniżej 4. roku życia należy skonsultować z lekarzem.