

# Irigasin Junior, zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok, 30 saszetek



Cena: 15,29 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	30 saszetek
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

### Opis

Irigasin Junior, wyrób medyczny przeznaczony do przygotowania roztworu do płukania nosa i zatok. Umożliwia przygotowanie zarówno roztworu izotonicznego, jak i hipertonicznego, w zależności od potrzeb pacjenta.

- Roztwór izotoniczny działa nawilżająco na śluzówkę nosa wysuszoną w wyniku długotrwałego stosowania leków do nosa lub w następstwie przebywania w klimatyzowanych lub nadmiernie ogrzewanych pomieszczeniach.
- Hipertoniczny roztwór chlorku sodu, poza działaniem oczyszczającym, ze względu na większe stężenie substancji czynnej, wykazuje właściwości osmotyczne, dzięki którym zmniejsza obrzęk śluzówki. Jest więc zalecany w przypadku obrzęku nosa, towarzyszącego nieżytowi nosa w trakcie infekcji lub alergii (katar sienny), a także zapalenia zatok.

### Zastosowanie

Izotoniczny roztwór chlorku sodu oczyszcza jamy nosa z zalegającej wydzieliny, bakterii, wirusów i alergenów, a także pielęgnuje nos i zatoki w przypadku:

- ostrego lub przewlekłego zapalenia zatok przynosowych
- nieżytu nosa w przebiegu infekcji lub alergii
- przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok
- po ekspozycji na wysokie stężenie pyłu w powietrzu
- profilaktycznie dla utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok

### Sposób użycia

- Dzieci powyżej 4. roku życia: płukanie nosa i zatok należy wykonywać 1-2 razy dziennie lub według zaleceń lekarza. Dzieci mogą stosować wyrób jedynie pod kontrolą osoby dorosłej. Przed zastosowaniem wyrobu u dzieci poniżej 4. roku życia, należy skonsultować się z lekarzem.

- W celu przygotowania roztworu izotonicznego do butelki należy wsypać 1 saszetkę proszku, a następnie uzupełnić ją przegotowaną, ostudzoną wodą do zaznaczonej linii (120 ml).
- W celu przygotowania roztworu hipertonicznego do butelki należy wsypać 2 saszetki proszku, a następnie uzupełnić ją przegotowaną, ostudzoną wodą do zaznaczonej linii (120 ml).

Do płukania należy używać wyłącznie butelki dostępnej w zestawie Irigasín Junior (irygator + 12 saszetek). Nie stosować w przypadku uszkodzenia butelki. Do każdego płukania należy przygotować świeży roztwór.

#### Skład

Chlorek sodu.

#### Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W oryginalnym opakowaniu.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.
- Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na chlorek sodu.
- Jeżeli objawy towarzyszące nieżytowi nosa lub zapaleniu zatok się nasilają należy skontaktować się z lekarzem.
- Nie stosować w przypadku całkowitej blokady nosa, uniemożliwiającej wydostanie się roztworu.
- Nie stosować w przypadku infekcji lub uczucia zatkania ucha.
- W przypadku przebytej operacji ucha przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.
- Po zakończeniu irygacji może pojawić się nieznaczny wyciek pozostałości roztworu z nosa przy pochylaniu.
- Nie stosować później niż na godzinę przed snem.
- Bezpośrednio po irygacji, przez godzinę dziecko nie powinno się kłaść, żeby pozostałości roztworu nie dostały się do ucha.
- Dzieci mogą stosować wyrób samodzielnie jedynie pod kontrolą osoby dorosłej.
- Możliwość stosowania u dzieci poniżej 4. roku życia należy skonsultować z lekarzem.