

Jasnum Comfort, 10 globulek dopochwowych



Cena: 44,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	10 globulek dopochwowych
Postać	globulki dopochwowe
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

Jasnum Comfort, wyrób medyczny w postaci globulek dopochwowych. Zawiera kwas hialuronowy, kwas mlekowy i witaminę E. Jasnum Comfort, nawilża, chroni i przywraca elastyczność błony śluzowej pochwy, przywraca fizjologiczne pH pochwy, co sprzyja utrzymaniu prawidłowej flory bakteryjnej, redukuje nieprzyjemny zapach.

Bezpieczeństwo i działanie składników potwierdzone w badaniach naukowych.

Zastosowanie

Dla kobiet w okresie menopauzy, w celu łagodzenia dyskomfortu, uczucia suchości oraz napięcia, swiędu i pieczenia błon śluzowych pochwy. Stosowanie preparatu zapobiega uszkodzeniom nabłonka podczas aktywności ruchowej, stosunków, badań ginekologicznych.

Sposób użycia

- Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania dopochwowego.
- Przed aplikacją wyrobu należy dokładnie umyć ręce.
- Z blistra wyjąć 1 globulkę poprzez oderwanie folii wzdłuż perforacji i rozchylenie listków folii.
- Globulkę umieścić głęboko w pochwie.
- W przypadku gdy konsystencja globulki jest zbyt miękka, przed wyjęciem z folii należy umieścić ją na kilka minut w lodówce, do momentu stwardnienia globulki.
- Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, stosować 1 globulkę na noc przez 7 kolejnych dni. Następnie w celu utrzymania działania stosować 1 globulkę co 2-3 dni aż do ustąpienia objawów. Nie stosować wyrobu dłużej niż przez 30 dni. W przypadku pominięcia zastosowania globulki, nie stosować dawki podwójnej. Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania dopochwowego.

Skład

1 globulka zawiera: sól sodowa kwasu hialuronowego, glikogen, kwas mlekowy, octan tokoferylu, mleczan sodu, glicerydy półsyntetyczne.

Przechowywanie

- W temperaturze pokojowej, w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed światłem.
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować:

- w czasie menstruacji.
- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu,
- ze środkami znieczulającymi miejscowo i innymi preparatami dopochwowymi, gdyż preparat może osłabiać lub opóźniać ich działanie,
- wraz z lateksowymi prezerwatywami i wkładkami antykoncepcyjnymi, ponieważ wyrób poprzez zawartość tłuszczów może ograniczać ich skuteczność,
- w przypadku upływu terminu ważności,
- w przypadku uszkodzenia blistra,
- ponownie raz zaaplikowanej globulki.

Nie odbywać stosunków płciowych bezpośrednio po aplikacji globulki.

W ciąży i w trakcie karmienia stosować po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku ostrej infekcji pochwy stosować tylko po konsultacji z lekarzem.

Unikać przypadkowego kontaktu wyrobu ze śluzówką oka, nosa lub ust.

Ze względu na zawartość kwasu mlekowego mogą wystąpić nieznaczne reakcje skórne (łagodne pieczenie lub swędzenie), zwłaszcza przy dużej suchości pochwy. Objawy te mają charakter przejściowy i zwykle ustępują.

Dodatkowe informacje

Bez PEG, parabenów, SLS.