


Jasnum Sensi, żel intymny, 50 ml

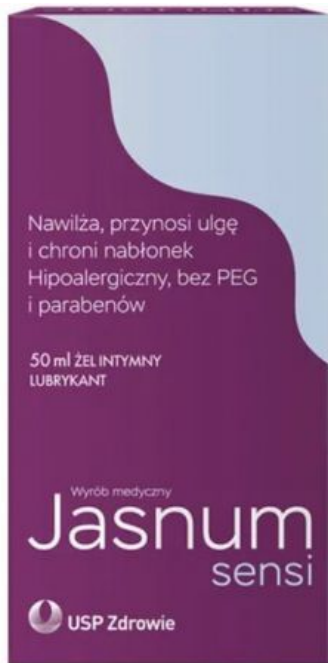

Cena: 39,90 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	50 ml
Opakowanie	50 ml
Postać	żel
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

Jasnum Sensi, żel intymny, lubrykant, specjalistyczny wyrób medyczny, który zapewnia dodatkowe nawilżenie okolic intymnych podczas stosunków płciowych. Żel intymny pomaga łagodzić dolegliwości bólowe, nawilżyć okolice intymne, minimalizować otarcia podczas stosunku w przypadku suchości błony śluzowej. Stosowanie żelu intymnego pozwala uniknąć mechanicznych mikrouszkodzeń, otarć i podrażnień naskórka oraz śluzówki.

Zastosowanie

- ułatwienie stosunku płciowego przy utrudnionej penetracji, które mogą być problematyczne ze względu na suchość pochwy, także z użyciem prezerwatywy,
- łagodzenie bólu narządów płciowych w trakcie stosunku,
- łagodzenie objawów suchości pochwy prowadzącej do otarć i uszkodzeń nabłonka miejsc intymnych w trakcie stosunku płciowego,
- wspomaganie przy przeprowadzeniu badań ginekologicznych lub dopochwowego pomiaru temperatury.

Sposób użycia

- Przed aplikacją należy dokładnie umyć ręce.
- Żel nałożyć na miejsce narażone na otarcia (przed planowanym stosunkiem lub badaniem ginekologicznym).
- Wyrób może być stosowany razem z prezerwatywami lateksowymi, poliuretanowymi i poliozoprenowymi.
- Preparat może być aplikowany bezpośrednio na prezerwatywę.
- Stosować w zależności od potrzeb, regularnie, kilka razy w ciągu dnia, bez ograniczeń wiekowych.

Skład

Glicerol, kwas cytrynowy, hydroksyetyloceluloza, fenyletanol, glikol kaprylowy, woda oczyszczona.

Przechowywanie

- W temperaturze pokojowej, chronić przed źródłem światła i ciepła.
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Żel może wpływać na ruchliwość plemników i zmniejszyć zdolność do zajścia w ciążę.
- W przypadku utrzymującej się suchości pochwy należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Nie stosować wyrobu podczas menstruacji.
- Nie stosować ze środkami znieczulającymi miejscowo i innymi preparatami dopochwowymi, gdyż preparat może zmniejszać lub opóźniać ich działanie.
- Unikać przypadkowego kontaktu żelu ze śluzówką oka.
- Nie połykać.

Dodatkowe informacje

- Produkt niehormonalny, hipoalergiczny, bez dodatku substancji zapachowych, wegański i nietestowany na zwierzętach, nie zawiera PEG, parabenów, detergentów, w tym SLS, SLES.
- Przed zastosowaniem żelu należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do opakowania.