

## Keto-Diastix, testy paskowe, 50 pasków



Cena: 33,00 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	50 pasków
Postać	test paskowy
Producent	BAYER CONSUMER CARE AG
Rejestracja	
Substancja czynna	Paski do oznaczania glukozy i ciał ketonowych w moczu

### Opis produktu

#### Opis

Keto-Diastix, wyrób medyczny w postaci testów paskowych do badania moczu, przeznaczony do samokontroli obecności glukozy i ciał ketonowych w moczu. Oznaczanie stężenia glukozy i ciał ketonowych w moczu pomaga pacjentom cierpiącym na cukrzycę w rozpoznawaniu i dalszej diagnostyce diabetologicznej.

#### Zastosowanie

Testy paskowe do badania moczu, do samokontroli obecności glukozy i ciał ketonowych w moczu.

#### Sposób użycia

Pobrać próbkę moczu do czystego, suchego pojemnika i przeprowadzić badanie możliwie jak najszybciej (ewentualnie test paskowy można umieścić pod strumieniem świeżego moczu). Po 15 sekundach od zwilżenia paska moczem odczytać zawartość ciał ketonowych porównując kolor otrzymany na pasku z polami barwnymi umieszczonymi na butelce. Po 30 sekundach od zwilżenia paska moczem odczytać zawartość glukozy porównując kolor otrzymany na pasku z polami barwnymi umieszczonymi na butelce. W przypadku gdy badanie wykaże średnią lub wysoką zawartość ciał ketonowych w moczu, należy skontaktować się z lekarzem.

#### Przechowywanie

- W temperaturze pokojowej między 15, a 30°C.
- Pasków nie należy przechowywać w lodówce.
- Nie przechowywać w lodówce.
- Chronić przed światłem i wilgocią.

#### Dodatkowe informacje

- Keto-Diastix należy używać pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami lekarza.
- Przed użyciem należy dokładnie przeczytać wskazówki w ulotce dołączonej do opakowania.
- Nie usuwać środka osuszającego, który znajduje się w butelce.

- Zużyć w ciągu 6 miesięcy po pierwszym otwarciu.
- Po każdym wyjęciu paska należy od razu szczelnie zamykać buteleczkę.