

Kompres Flex Standard Sanity, ciepły/zimny, rozmiar 10x26 cm, 1 sztuka



Cena: 25,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Postać	kompres żelowy
Producent	ALBERT POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Kompres Flex Standard Sanity, ciepły/zimny, rozmiar 10x26 cm. Kompres jest elastyczny nawet przy -18oC. Sprawdza się jako alternatywa leczenia farmakologicznego. Kompres polecany dla kobiet karmiących piersią - łagodzi ból i obrzęki. Bezpieczny dla dzieci. Kompres można stosować wielokrotnie. Zimne okłady zmniejszają obrzęk, stany zapalne, zaczerwienienia. Przyspieszają wchłanianie krwiaków, siniaków, łagodzą drobne stłuczenia. Obniżają temperaturę ciała w trakcie gorączki, pomagają przy poparzeniach lub tamowaniu krwotoku z nosa. W ciąży i okresie karmienia piersią zimne kompresy przynoszą ulgę w przypadku bolących piersi, łagodzą stany zapalne, zmniejszają obrzęki i uczucie nadwrażliwości. Ciepłe okłady wspomagają w leczeniu przewlekłego bólu mięśniowo-szkieletowego. Przynoszą ulgę w uciążliwych dolegliwościach reumatoidalnego zapalenia stawów i bólu stawów. W ciąży i karmienia piersią udrażniają kanaliki mlekowe i stymulują wypływanie mleka.

Zastosowanie

- Zimne okłady: urazy (takie jak skręcenie, zwichnięcie stawów), stłuczenie mięśni, naderwanie ścięgien. Ból spowodowany urazami układu mięśniowo-szkieletowego, ból zębów i głowy.
- Ciepłe okłady: przewlekły ból mięśniowo-szkieletowy. Skurcze mięśni (ból pleców, bóle menstruacyjne, skurcze nóg). Dolegliwości reumatoidalnego zapalenia stawów i bólu stawów.
- W czasie ciąży i karmienia piersią.

Sposób użycia

- Zimne okłady: umieść kompres w zamrażarce na minimum 2 godziny.
- Ciepłe okłady: w kuchence mikrofalowej podgrzewaj przez ok. 4 minuty w temperaturze rozmrażania lub zanurz kompres w gorącej wodzie na ok. 5 minut.
- Po odpowiednim przygotowaniu kompres osusz, włóż do ochronnego pokrowca, a następnie przykładaj do ciała.

Dodatkowe informacje

- Nie stosować bezpośrednio na rany.
- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją.