

Lapis Diabelski Kamyk, sztyft do usuwania brodawek, 1 sztuka



Cena: 26,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Postać	sztyft
Producent	SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	Argenti nitras

Opis produktu

Opis

Lapis Diabelski Kamyk, to sztyft stosowany pomocniczo w leczeniu niektórych zmian skórnych pochodzenia wirusowego: brodawek zwykłych (*verrucaevulgares*) oraz kłykcin kończystych (*condylomataacuminata*). Przyspiesza ziarninowanie i epitelializację. Skutecznie wspomaga gojenie uszkodzonej skóry.

Zastosowanie

Pomocniczo w leczeniu niektórych zmian skórnych pochodzenia wirusowego: brodawek zwykłych (*verrucaevulgares*) oraz kłykcin kończystych (*condylomataacuminata*).

Sposób użycia

- Przed użyciem założyć okulary ochronne oraz zaleca stosowanie rękawic ochronnych (np. lateksowych),
- Zdjąć z produktu zatyczkę ochronną i usunąć cienką, kolorową warstwę parafiny która chroni sztyft przed wilgocią z powietrza,
- Z czubka sztyftu na długości ok. 3-4 mm. bardzo delikatnie zeszkrobać kolorową warstwę zielonej parafiny ostrym nożem, tak by nie uszkodzić sztyftu. Nie wdychać pyłu,
- Ostrożnie pocierać powierzchnię brodawki (kurzajki) sztyftem ruchami kołowymi przez kilka sekund. Naturalna wilgotność dotkniętego miejsca po kilku minutach rozpocznie reakcję z azotanem srebra, co przejawia się szernieniem w miejscu aplikacji,
- Nie dopuścić do kontaktu ze zdrową skórą,
- Po 24 godzinach od aplikacji można przyspieszyć gojenie poprzez usunięcie powstałej czarnej plamy np. przez oszlifowanie przy pomocy pumeksu. Zabieg powtarzamy, aż do całkowitego zniknięcia defektu skórnej kurzajki,
- Każdorazowo po aplikacji sztyft chronić przed wilgocią z powietrza przez możliwie szybkie założenie zatyczki ochronnej.

Skład

Azotan srebra 97 części, azotan potasu 3 części.

Przechowywanie

- W suchym miejscu,

- W temperaturze 15 – 25 °C,
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Lapis Diabelski Kamyk przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Nie stosować produktu na błony śluzowe oraz miejsca silnie ukrwione.
- Nie wolno stosować również produktu w przypadku zmian zlokalizowanych w okolicy oczu.
- Należy chronić oczy przed dostaniem się produktu (okulary ochronne).
- W razie przypadkowego dostania się produktu na błony śluzowe należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia silnego pieczenia lub bólu, należy skonsultować się z lekarzem.
- Produkt może pozostawić zabrudzenia na odzieży.
- W przypadku niezamierzonego kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody. Kontynuować tę czynność przez 10 min. i wezwać pomoc medyczną.
- W przypadku niezamierzonego kontaktu ze skórą zmyć mydłem z wodą.
- Usunąć jakiegokolwiek zanieczyszczenia z ubrania.
- W razie połknięcia, natychmiastowo wezwać pomoc medyczną.