

LH Vitam, test owulacyjny paskowy, 5 testów



Cena: 14,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	5 sztuk
Postać	test
Producent	DIAGNOSIS S.A.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

LH Vitam, test owulacyjny paskowy, do domowego użytku. Wyrób medyczny do samokontroli. Test pozwala on określić dni płodne kobiety z dokładnością 98%. Test owulacyjny pozwala poziom hormonu luteinizującego (LH) w moczu. Poziom tego hormonu wzrasta tuż przed najbardziej płodnym dniem w miesiącu.

Zastosowanie

Test owulacyjny przeznaczony dla kobiet, które chcą określić dni płodne.

Sposób użycia

- Przed przeprowadzeniem testu owulacyjnego należy przeczytać całą instrukcję użycia, dołączoną do opakowania.
- Nie należy używać pierwszego porannego moczu.
- Test należy wykonać w godzinach 10-20.
- Na początku należy określić długość cyklu miesięczkowego licząc od pierwszego dnia krwawienia, aż do dnia poprzedzającego kolejną miesiączkę. Ustal średnią długość cyklu na podstawie obserwacji przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Następnie przyjmując pierwszy dzień krwawienia jako dzień 1 (zaznacz go w kalendarzu), użyj Tabeli 1 aby określić kiedy powinnaś rozpocząć przeprowadzanie testu.
- Test wykonuj w temperaturze pokojowej.
- Test wyjmij z foliowego opakowania tuż przed przeprowadzeniem badania.
- Trzymając za uchwyt zanurz test końcówką testową na 3 sekundy w moczu zgromadzonym w pojemniku nie przekraczając maksymalnego poziomu zanurzenia.
- Wyjmij test i połóż na suchej i czystej powierzchni.
- Odczytaj wynik w ciągu 5 minut obserwując pojawianie się linii T i C w polu testowym.
- Po odczytaniu wyniku, wyrzuć test.
- Wyniku nie odczytuj po upływie 5 minut, ponieważ na skutek dalszych reakcji chemicznych wynik pokazany po tym czasie może być zafałszowany.

