

Microdot, paski testowe do glukometru, 50 pasków



Cena: 36,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	50 pasków
Postać	test paskowy
Producent	GLUKOPHARMA SP. Z O.O
Rejestracja	wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Paski do oznaczania glukozy we krwi

Opis produktu

Opis

Microdot paski testowe służą do pomiaru stężenia glukozy we krwi. Do użytku tylko z aparatem Microdot.

Zastosowanie

Do wykonywania pomiarów poziomu glukozy we krwi.

Sposób użycia

- Nakłuć skórę za pomocą specjalnego ostrza zawartego w zestawie.
- Wcisnąć delikatnie miejsca nakłucia aż pokaże się kropla krwi.
- Próbkę krwi musi zawierać przynajmniej 0,6 mikrolitra aby uzyskać wiarygodny wynik oznaczenia.
- Dotknij i przytrzymaj końcówkę paska przy kropli krwi w taki sposób, by była w kontakcie z częścią pomiarową paska.

Przechowywanie

- Chronić przed światłem.
- W temperaturze 10-30oC.