

Mucovagin, żel dopochwowy, 25 g x 7 aplikatorów

Cena: 39,90 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	25 g
Postać	żel
Producent	VERCO
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

Żel Mucovagi to innowacyjny preparat, dla kobiet, cierpiących z powodu suchości miejsc intymnych. Powoduje szybkie nawilżenie i regeneracja dla kobiet w każdym wieku. Kwas hialuronowy, który jest naturalnym budulcem organizmu ludzkiego, wiążąc się z wilgotną wydzieliną błony śluzowej pochwy, tworzy na jej powierzchni żelową powłokę, która stanowi barierę ochronną zabezpieczającą błonę śluzową i stwarzającą odpowiednie warunki do aktywacji naturalnych mechanizmów regeneracyjnych i obronnych. Zapobiega rozwojowi flory patogenicznej, przywraca naturalną wilgotność, ułatwia i przyspiesza procesy gojenia.

Zastosowanie

- W regeneracji i nawilżaniu błony śluzowej pochwy oraz zewnętrznych okolic intymnych,
- Jako intensywnie nawilżający lubrykant, poprawiający kontakty intymne,
- Jako łatwiejsza forma do aplikacji, np. po leczeniu onkologicznym,
- Jako żel poporodowy, przyspieszający prawidłowe gojenie krocza w okresie połogu.

Sposób użycia

- Przed użyciem i po użyciu żelu należy dokładnie umyć ręce.
- Do stosowania wewnętrznie, miejscowo do pochwy lub zewnętrznie na okolice narządów płciowych.
- Przy stosowaniu wewnętrznym - aplikować wewnętrznie, w pozycji leżącej, za pomocą aplikatora dołączonego do opakowania, co pozwala zaaplikować odpowiednią ilość żelu.
- Przy stosowaniu zewnętrznym - nanieść niewielką ilość produktu (zawartość aplikatora) na okolice zewnętrznych narządów płciowych.

Skład

Kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej kwasu hialuronowego), woda, glikol propylenowy, karbomer, trójetanoloamina.

Przechowywanie

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w zacienionym i miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- W miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Od pierwszego otwarcia należy zużyć.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.

Dodatkowe informacje

- Każdorazowo należy zasięgnąć konsultacji lekarza lub farmaceuty.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Interakcje z innymi lekami lub wyrobami medycznymi dopochwowymi nie są znane.
- Aplikator przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użytku. Nie używać ponownie aplikatorów.
- Stosować tylko zgodnie z instrukcją używania.