

# Nebulizator Air Pro Portable Mesh, 1 sztuka



Cena: 249,00 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Producent	PULINNO SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Opis

Nebulizator Air Pro Portable Mesh, to przenośny, niewielkich rozmiarów nebulizator membranowy/siateczkowy. Nebulizator przeznaczony jest do terapii wziewnej. Może być używany zarówno przez dzieci jak i dorosłych w przypadku niskiej wydolności oddechowej. Urządzenie może być stosowane do wszystkich leków z wyjątkiem leków pentamidynowych oraz cieczy zawierających estry, oleje, cząsteczki zawiesin łącznie z ekstraktami ziołowymi a także preparatów zawierających kwas hialuronowy. Urządzenie umożliwia wykonanie trzech sposobów nebulizacji: bezpośrednio, przez ustnik lub przez maskę. Urządzenie posiada adapter zasilania oraz w w zestawie znajduje się kabel USB. Zapakowane jest w poręczne etui, dzięki temu wszystkie elementy znajdują się w jednym miejscu.

### Zastosowanie

Nebulizator do terapii wziewnej u dzieci i dorosłych w przypadku niskiej wydolności oddechowej.

### Sposób użycia

- Przed pierwszym użyciem zdezynfekuj urządzenie.
- Otwórz pokrywę, wlej lek do pojemnika i zakręć pokrywę.
- Kliknij ON/OFF, urządzenie się włączy i rozpocznie nebulizację.
- Nebulizator należy trzymać w pozycji pionowej.
- Po włączeniu nebulizator działa przez 10 minut i po tym czasie wyłączy się automatycznie. Jeśli będzie potrzebna kontynuacja terapii wciśnij przycisk ON/OFF upewniając się wcześniej, że jest w pojemniku lek.
- Po zakończonej nebulizacji umyj i zdezynfekuj urządzenie zgodnie z zalecaną procedurą znajdującą się w instrukcji.

### Dodatkowe informacje

- Szybkość nebulizacji 0.15 - 0.9 ml/min.
- Pojemnik na lek: 10 ml.
- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do urządzenia.
- Nie należy stosować u osób z obrzękiem płuc.
- U osób z ostrą astmą i epizodami ostrego zawału płuc użytkowanie jest zabronione.