

Nexcare Cold Hot Classic Zimno-ciepły, okład wielokrotnego użytku



Cena: 39,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Postać	okład
Producent	3M POLAND SP Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Naturalna terapeutyczna moc zimna i ciepła. Ciepło pomaga zmniejszyć skurcze mięśni i ból. Kompres żelowy stosowany jako ciepły okład działa wspomagająco w terapii bolesnych skurczy mięśni i bólów reumatycznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Doskonale sprawdza się w bólach krzyża oraz w bólach mięśniowych. Ciepły kompres żelowy może być wykorzystywany jako termofor. Ma też działanie relaksujące i uspokajające.

Zimno pomaga zmniejszyć obrzęk, stan zapalny i ból. Jako zimny okład (po oziębieniu w zamrażalniku lub lodówce), kompres żelowy jest odpowiedni w przypadku urazów takich jak: stłuczenia, skręcenia, siniaki i guzy. Zimny okład żelowy może także przynieść ulgę w gorączce. Pomaga również w napięciowych bólach głowy.

Zastosowanie

- Okład ColdHot Classic na ciepło stosować w: sztywnieniu karku lub ramion, bólu krzyża, zapalenia stawów nadgarstka z wyłączeniem ostrej fazy zapalnej, uczucia zimna (używać jako termofor), bólach mięśniowych, sztywnieniu mięśni nóg.
- Okład ColdHot Classic na zimno stosować w: napięciowych bólach głowy, gorączce (nie obniża temperatury ciała), skręceniu np. kostki, obrzęku spowodowanym kontuzją/urazem.

Sposób użycia

Zimno - lodówka lub zamrażarka

Okład żelowy należy przechowywać w lodówce lub zamrażarce przez co najmniej 2 godziny przed użyciem. Okład żelowy będzie zawsze gotowy do użycia, jeśli jest stale przechowywany w lodówce lub zamrażarce.

Zawsze umieszczaj okład żelowy w załączonym pokrowcu lub czystym ręczniku, gdy nakładasz go na skórę.

Przyłóż okład, jednak nie dłużej niż na 20 minut. Następnie odczekaj kolejne 20 minut przed powtórnym zastosowaniem okładu.

Ciepło

Kuchenka mikrofalowa: należy położyć okład płasko w kuchenke mikrofalowej nastaw moc grzania na 640 W i podgrzewaj 2 x 30 sekund. Ostrożnie wyjąć okład z kuchenki mikrofalowej. Po każdym ogrzewaniu ugniatać opakowanie w celu równomiernego rozprowadzenia ciepła.

Gorąca woda

Zagotuj wodę i ściągnij ją z ognia / źródła ciepła. Zanurz okład żelowy w zagotowanej wodzie (zdjętej z ognia/źródła ciepła) na 60 sekund. Ostrożnie wyjmij okład z wody. Ugniataj, by równomiernie rozprowadzić ciepło. Zawsze umieszczaj okład żelowy w załączonym pokrowcu lub czystym ręczniku, gdy nakładasz go na skórę. Przyłóż na bolące miejsca do momentu odczucia dyskomfortu. Gdy okład osiągnie temperaturę pokojową, w celu dalszego użycia należy go ponownie ogrzać.

Instrukcja konserwacji okładów żelowych: okład może być czyszczony ręcznie w łagodnych detergentach. Nie należy stosować alkoholu ani innych rozpuszczalników do czyszczenia okładu. Przechowuj w ciemnym miejscu.

Skład

Okład wypełniony jest żelem, który jest bezpieczny i nietoksyczny, podlega biodegradacji w 99%* i jest przyjazny dla środowiska.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować na uszkodzoną i wrażliwą skórę.
- Osoby, u których stwierdzono lub podejrzewa się problemy z krążeniem nie powinny stosować produktu, chyba że lekarz zaleci inaczej.
- Zalecany jest nadzór w przypadku używania produktu przez dzieci oraz osoby z zaburzeniami poznawczymi.
- Kobiety w ciąży powinny zasięgnąć porady położnej lub ginekologa przed użyciem.

Dodatkowe informacje

- Wymiary kompresu to 110 mm x 260 mm. Opakowanie zawiera ochronny pokrowiec, który umożliwia łatwe, wygodne i bezpieczne stosowanie.
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Nigdy nie podgrzewaj okładów, które są złożone, zgięte lub zamrożone. Skutkiem może być wyciek.
- Przegrzanie okładu może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie podgrzewaj w piekarniku ani na grilu.
- Okład żelowy nie jest przeznaczony do ciągłego ogrzewania.
- Sprawdź szczelność przed użyciem.
- Nie należy używać uszkodzonych okładów. Wyrzuc okład, jeśli zauważysz wyciek.
- Nie używaj gdy widoczne jest zniszczenie materiału: żel stał się płynny, folia została przerwana i żel wycieka.
- Jeżeli moc kuchenki mikrofalowej jest nieznaną, prosimy o stosowanie najniższego ustawienia mocy (odmrażanie) i podgrzewanie produktu w okresach 30-sekundowych.
- Zachowaj ostrożność przed wyjęciem gorącego okładu z wody / kuchenki mikrofalowej gołymi rękami.
- Jeśli okład jest zbyt gorący przed użyciem należy poczekać aż temperatura spadnie.
- Nie przykładaj okładu bezpośrednio do skóry. Użyj załączonego pokrowca ochronnego lub owiń okład w czysty bawełniany ręcznik.
- Nie należy siadać, nie opierać się i nie wywierać dużego nacisku na okład żelowy ponieważ może to spowodować pęknięcie okładu i/lub wyciek żelu. Nie stosować podczas snu.
- Należy uważać w celu uniknięcia odmrożeń i powierzchniowych uszkodzeń nerwów.
- Nadmierne ogrzewanie okładu żelowego może spowodować oparzenia.
- Gorący okład może spowodować oparzenia.
- W przypadku odczuwania dyskomfortu należy przerwać terapię.
- Jeżeli objawy utrzymują się, należy skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem i / lub farmaceutą.