

# Omron M-3 Comfort, ciśnieniomierz automatyczny, naramienny, 1 sztuka

Cena: 149,90 zł



## Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Postać	ciśnieniomierz
Producent	PRODUCENCKA CENTRALA FARMAC.PROCEFAR SP. Z O.O
Rejestracja	wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Opis produktu

Omron M3 Comfort Automatyczny ciśnieniomierz naramienny, do kontroli tętna i ciśnienia krwi w warunkach domowych. Szczególnie polecany dla osób ze zdiagnozowanym nadciśnieniem, diabetyków, kobiet w ciąży i ze zdiagnozowanym stanem przedzucawkowym oraz dla pacjentów, którzy potrzebują urządzenia dla więcej niż jednego użytkownika. Urządzenie zapewnia bardzo wysoką dokładność pomiaru ciśnienia krwi. M3 Comfort wykrywa nieregularne bicie serca, pomaga zapobiegać ryzykom udaru. Ciśnieniomierz posiada funkcję uśredniania 3 wyników pomiarów dla jeszcze większej dokładności oraz pamięć 60 pomiarów dla 2 użytkowników + tryb gościa, co pozwala kilku osobom na korzystanie z tego samego urządzenia. Ciśnieniomierz posiada wskaźnik prawidłowego założenia mankietu oraz czujnik ruchu ciała.

### Zastosowanie

Samodzielny pomiar ciśnienia w warunkach domowych.

### Sposób użycia

- Aby uzyskać dokładny pomiar 30 minut przed pomiarem nie należy pić alkoholu, palić papierosów, pić kawy, uprawiać sportu, spożywać posiłków, brać prysznic.
- 5 minut przed pomiarem usiądź w wygodnej pozycji i odpręż się.
- Załóż mankiet ciśnieniomierza około 1-2cm powyżej zgięcia łokcia tak, aby się nie zsuwał.
- Aby uzyskać dokładny wynik podczas pomiaru ciśnienia krwi powinieneś siedzieć nieruchomo.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku pacjentek po mastektomii przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy:

- Używać urządzenia na ramieniu z obrażeniami lub ramieniu poddawanemu leczeniu.

- Zakładać mankietu na ramię, do którego podłączony jest dożylny wlew kroplowy lub jest przetaczana krew.
- Używać ciśnieniomierza w miejscach wilgotnych lub takich, w których istnieje ryzyko zamknięcia urządzenia. Może to doprowadzić do uszkodzenia ciśnieniomierza.
- Używać ciśnieniomierza w poruszającym się pojeździe, na przykład w jadącym samochodzie lub lecącym samolocie.

#### Dodatkowe informacje

- Technologia Intelli Wrap Cuff – unikalny mankiet zapewnia dokładne wyniki pomiarów w dowolnej pozycji dookoła ramienia .
- Pamięć urządzenia – 2 użytkowników x 60 pomiarów + tryb gościa. Twój ciśnieniomierz przechowuje dane 2 użytkowników, pozwalając monitorować indywidualne odczyty i trendy.
- Dokładność pomiaru potwierdzona walidacją kliniczną ciśnieniomierza dla ogólnej populacji, kobiet w ciąży oraz diabetyków.
- Wskaźnik wysokiego ciśnienia - pojawia się jeśli wartość ciśnienia przekracza zalecany poziom.
- Wskaźnik nieregularnego bicia serca – pojawia się gdy urządzenie podczas pomiaru wykrywa arytmie.
- Wskaźnik ruchu ciała – pojawia się w przypadku wykrycia ruchów ciała podczas pomiaru aby uniknąć nieprecyzyjnych wyników.
- Wskaźnik założenia mankietu – informuje czy mankiet został założony prawidłowo.
- Nowy intuicyjny design – ułatwia korzystanie z urządzenia podczas codziennych pomiarów oraz monitorowania wyników pomiarów.
- Metoda pomiaru: oscylometryczna.
- Pamięć: 60 odczytów x 2 użytkowników + tryb gościa.
- Zakres ciśnienia dla mankietu: od 0 do 299 mmHg.
- Zakres pomiaru tętna: od 40 do 180 uderzeń/min.
- Zakres pomiaru ciśnienia krwi DIA (rozkurczowe): od 40 do 215 mmHg.
- Zakres pomiaru ciśnienia krwi SYS (skurczowe): od 60 do 260 mmHg .
- Dokładność pomiaru ciśnienia:  $\pm 3$  mmHg / tętna:  $\pm 5\%$  wskazywanego odczytu.
- Pompowanie: Automatyczne za pomocą pompy elektrycznej.
- Wypuszczanie powietrza: Automatyczny zawór uwalniania powietrza.
- Źródło zasilania: 4 baterie AA 1,5 V (w zestawie) lub opcjonalny zasilacz.
- Trwałość baterii: około 1000 pomiarów (na nowych bateriach alkalicznych).
- Waga: ciśnieniomierz ok. 337 g (bez baterii) / mankiet: ok. 163 g.
- Wymiary ciśnieniomierza: 105 mm (szer.) x 85 mm (wys.) x 152 mm (dł.).
- Wymiary mankietu: 145 mm 532 mm (przewód powietrza: 750 mm).

#### Galeria

