

Opokan Med, plastry rozgrzewające, 10 plastrów leczniczych

Cena: 3,52 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	10 plastrów leczniczych
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wskazania

Bóle mięśni (pleców, ramion, szyi), nerwobólach, bólach reumatycznych i stawowych. Redukuje stan zapalny.

Składniki

Sproszkowane żelazo, woda, sól sodowa, węgiel drzewny.

Stosowanie

Sposób użycia:

- skóry musi być czysta, sucha i odtłuszczona,
- bezpośrednio przed użyciem ostrożnie rozerwać saszetkę z plastrem, wyjąć plaster,
- zdjęć taśmę zabezpieczającą część klejącą plastra i niezwłocznie przykleić plaster w miejscu odczuwania bólu,
- plaster rozgrzeje się stopniowo do przyjemnej, przynoszącej ulgę temperatury (ok. 50°C),
- plaster mocno trzyma się w miejscu naklejenia,
- plaster jest jednorazowy i przeznaczony jedynie do użytku zewnętrznego,
- plaster można utrzymywać na skórze do 12 godzin,
- podczas stosowania należy kontrolować stan skóry. W przypadku stwierdzenia podrażnienia, opuchnięcia, zaczerwienienia skóry, należy natychmiast zdjąć plaster
- w przypadku odczuwania zbyt wysokiej temperatury należy przerwać stosowanie,
- nie przykładać dodatkowego ucisku lub opaski dociskającej plaster,
- u osób z niską tolerancją termiczną stosować plaster tylko na odzież bezpośrednio przylegającą do ciała,
- u osób starszych stosować plaster tylko na odzież bezpośrednio przylegającą do ciała.

Przechowywanie

Plaster rozgrzewający należy przechowywać z dala od światła, w temperaturze pokojowej, w suchym i niedostępnym dla małych dzieci miejscu.

Przeciwwskazania

Nie stosować na skórę chorą, podrażnioną, popękaną, uszkodzoną, po urazie lub podczas kąpieli.

Nie stosować również na skórę z wylewami podskórnymi lub obrzękami.

Nie stosować na obszarach ciała z upośledzonym czuciem ciepła.

Plaster natychmiast usunąć w przypadku stwierdzenia silnego ciepła w miejscu jego stosowania (w sytuacji, kiedy odczuwalna temperatura jest zbyt wysoka) lub gdy dojdzie do podrażnienia, zaczerwienienia, pieczenia lub opuchnięcia skóry. W przypadku gdy tolerancja termiczna skóry jest niska, plaster należy nakleić na bieliznę lub warstwę odzieży (dotyczy to szczególnie osób starszych).

Nie stosować u osób, nie będących w stanie w pełni dostosować się do instrukcji użycia lub samodzielnie zdjąć plaster, szczególnie u dzieci i osób w podeszłym wieku.

Plastra nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Nie stosować plastra, który jest uszkodzony mechanicznie.

Po kontakcie zawartości uszkodzonego plastra z oczami lub skórą, natychmiast miejsce kontaktu przemyć wodą.

Użytego plastra nie podgrzewać powtórnie w inny sposób (np. kuchenka mikrofalowa). Unikać bezpośredniego wystawiania plastra na słońce.

Nie należy stosować plastra w miejscu infekcji, a także równocześnie z innymi produktami leczniczymi stosowanymi miejscowo na skórę (np. preparaty przeciwbólowe lub rozgrzewające itp.) ani z innymi środkami emitującymi ciepło.

Nie należy stosować plastra w tym samym miejscu. W razie potrzeby jednak, kolejny plaster można nakleić w tym samym miejscu po upływie 24 godzin. Plastra nie stosować podczas snu. Nie stosować dodatkowego ucisku na plaster. Nie naklejać plastra na inny. W przypadku zapalenia stawów, ciąży, chorób skóry, cukrzycy, zaburzeń krążenia, chorób serca, przed zastosowaniem, należy skonsultować użycie plastra z lekarzem. Produkty rozgrzewające mogą powodować poparzenia. Ryzyko wystąpienia poparzeń wzrasta z wiekiem.

Działanie

Rozgrzewa i łagodzi dolegliwości: krzyżowo-lędźwiowe, reumatyczne, mięśniowe, stawowe, nerwobóle.