

# Opti-Free Express, płyn do soczewek, 120 ml



Cena: 17,99 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	120 ml
Postać	płyn dezynfekcyjny
Producent	ALCON POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Opis

Opti-Free Express, to wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny do soczewek. Zapewnia komfort na co dzień. Dezynfekuje, czyści, spłukuje i przechowuje miękkie (hydrofilowe) soczewki kontaktowe, także silikonowo-hydrożelowe.

### Zastosowanie

Płyn dezynfekcyjny do soczewek.

### Sposób użycia

- Przed użyciem dokładnie umyj i osusz ręce.
- Każdą stronę soczewki zmoć płynem Płynem Opti-Free Express.
- Każdą stronę soczewki potrzyj przez około 10 sekund, po czym dokładnie je opłukaj ciągłym strumieniem płynu Opti-Free Replenish.
- Pojemnik na soczewki napełnij świeżym płynem Opti-Free Express.
- Soczewki przechowuj w zamkniętym pojemniku na soczewki przez noc lub co najmniej przez 6 godzin.
- W przypadku gdy na soczewkach kontaktowych pozostały jakieś zanieczyszczenia, należy je opłukać płynem Opti-Free Express przed ich nałożeniem.
- Soczewki mogą być przechowywane w nieotwieranym pojemniku z płynem do 30 dni.

### Skład

Chlorek sodu, sorbitol, wersenian disodowy, kwas borny, aminometylopropanol, cytrynian sodu, Tetronic 1304 jako składniki czyszczące oraz środki konserwujące Polyquad (polikwaternium-1) 0,001%, Aldox (miristamidopropylodimetyloamina) 0,0005%.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie używać w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
- Nie używać do dezynfekcji ciepłej (termicznej).

**Dodatkowe informacje**

- Zawiera pojemnik na soczewki.
- Do czyszczenia należy używać tylko świeżego płynu.
- Nie należy używać płynu ponownie. Cały płyn pozostały w pojemniku na soczewki po dezynfekcji należy usunąć.
- Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką.