

# Otovent, zestaw do wyrównywania ciśnienia w przewodzie słuchowym, 1 sztuka



Cena: 62,95 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	1 zestaw
Producent	AXPHARM SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Opis

Otovent, wyrób medyczny wielokrotnego użytku, niejałowy, zestaw do wyrównywania ciśnienia w uchu środkowym. Zestaw składa się z lateksowego balonu i polipropylenowej końcówki nosowej, które przed użyciem łączą się ze sobą. Nadmuchiwany przez nos balon, służy do zwiększania ciśnienia w obrębie jamy nosowej, co powoduje otwarcie trąbki słuchowej (Eustachiusza) i wyrównanie ciśnień między jamą bębenkową (uchem środkowym) a jamą nosową, co skutkuje zlikwidowaniem ujemnego ciśnienia w uchu środkowym.

### Zastosowanie

Leczenie ujemnego ciśnienia w uchu środkowym u dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.

### Sposób użycia

- Balon połączyć z płaską stroną końcówki nosowej.
- Lewą ręką chwycić okrągłą część końcówki nosowej i przyłożyć ją do lewej dziurki nosa. Palcem wskazującym prawej ręki zatkać prawą dziurkę nosa.
- Wziąć głęboki wdech przez usta, zamknąć usta i wydmuchując powietrze przez lewą dziurkę nosa nadmuchać balon do rozmiaru 10-12 cm (wielkość grejfruta).
- Przytrzymując nadmuchany balon przy lewej dziurce nosa, kilka razy przełknąć.
- Powtórzyć procedurę dla prawej dziurki nosa.

### Przechowywanie

Chronić przed światłem.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie używać przy ostrym zapaleniu ucha środkowego lub infekcji górnych dróg oddechowych.
- W przypadku alergii na lateks przed użyciem należy zasięgnąć porady lekarza.

### Dodatkowe informacje

- Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.
- Po każdym użyciu oczyścić końcówkę nosową, korzystając z łagodnego detergentu. Wypłukać końcówkę nosową czystą wodą.
- Balon wyrzucić po 20-krotnym użyciu.

