


Plomb-R, tymczasowe wypełnienie zęba, 3 g

Cena: 43,95 zł

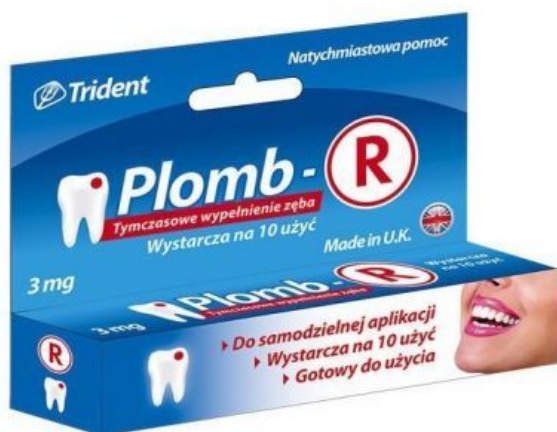

Opis słownikowy

| | |
|------------------|--------------------------|
| Cena jednostkowa | 3 g |
| Opakowanie | 3 g |
| Producent | TRIDENT SPÓŁKA AKCYJNA |
| Rejestracja | Wyrób medyczny leczniczy |

Opis produktu

Opis

Plomb-R, tymczasowe wypełnienie zęba, gotowe do użycia, do samodzielnej aplikacji. Preparat jest na bazie tlenku cynku i służy do wypełniania ubytków w zębach i niezwłocznej konsultacji z lekarzem stomatologiem. Preparat jest łatwy i szybki w użyciu. Pasta twardnieje w kontakcie ze śliną. Opakowanie wystarcza na 10 wypełnień.

Zastosowanie

Tymczasowe wypełnienie zęba.

Sposób użycia

- Wyciśnij niewielką ilość preparatu.
- Włóż do zęba wymagającego wypełnienia i delikatnie zagryź.
- Sprawdź czy ząb nie jest nadmiernie wypełniony preparatem. Odczekaj minutę, a następnie przepłucz usta ciepłą wodą i wypłuj.
- Przez co najmniej 15 minut nie zagryzaj i nie dociskaj wypełnienia w zębie.
- Jak najszybciej udaj się do stomatologa.
- Jeśli dostęp do zęba jest utrudniony należy użyć szpatułki znajdującej się w opakowaniu.
- Jeśli temperatura otoczenia jest niska, aplikator rozgrzej w dłoni, a następnie użyj.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Po wyciśnięciu, preparatu nie można ponownie umieszczać w aplikatorze.
- Nie należy używać w sposób ciągły dłużej niż 28 dni.